


Verkorte instructie verbredingsstang

Deze verkorte instructie is van toepassing op de verbredingsstang model 2023 van JOYinCARE. De volledige instructie is te vinden in de gebruikshandleiding van de tillift. Raadpleeg voor gebruik ook de gebruiksaanwijzing van de tilband.


De verbredingsstang is uitsluitend bedoeld om een Longseat verblijfsband met veiligheidsclips te kunnen gebruiken aan een 4-puntsjuk van een JOYinCARE tillift. Daarnaast is deze ook compatibel met het 4-puntsjuk van United Care, uitgevoerd met flexibele bevestigingspunten.

Instructies

- 1) Bevestig de clips van de verbredingsstang aan de been-ophangpunten van het 4-puntsjuk door de oranje beugel omlaag te duwen en de clips over de paddenstoelen te plaatsen.
- 2) Breng de Longseat verblijfsband aan onder de cliënt, zoals omschreven in de handleiding van de Longseat verblijfsband.
- 3) Bevestig de clips bij de schouders aan het juk en de clips bij de benen aan de ophangpunten van de verbredingsstang.
- 4) Controleer of alle clips de tilband en verbredingsstang goed vastzitten.

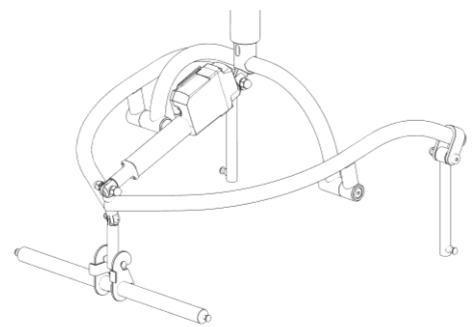

Na gebruik kan de verbredingsstang van het 4-puntsjuk worden verwijderd door de oranje beugel omlaag te duwen en de clips van de paddenstoelen af te halen.

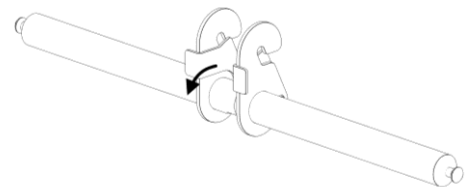

Waarschuwingen

- De verbredingsstang kan tot maximaal 200 kg worden belast.
- De verbredingsstang is alleen geschikt voor de JOYinCARE Longseat verblijfsband met veiligheidsclips in combinatie met een JOYinCARE tillift met 4-puntsjuk.
- Ook compatibel met 4-puntsjuk met flexibele bevestigingspunten van United Care.
- Om erosie te voorkomen mag de verbredingsstang niet worden gebruikt in het water / zwembad. Bij roestvorming dient de verbredingsstang buiten gebruik gesteld te worden.



Waarschuwing! Lees de gehele instructie door voordat u het product in gebruik neemt. De tillift dient enkel gebruikt te worden door aantoonbaar bekwame zorgverleners met adequate kennis over de uit te voeren handelingen. Neem bij vragen over het gebruik of de toepassing voor gebruik contact op met de leverancier.

JOYinCARE

✉ info@joyincare.com

☎ 0341 - 768080

VERSIE

07-2023