


Verkorte rij instructie JOYinCARE lift met Touch&Move 3.0 rijondersteuning

- Druk op de "Start" knop om de lift aan te zetten. Let op: Houdt hierbij niet de duwbeugel vast, want dan start de tillift niet.
- De lampjes op het display lichten op, de lift is opgestart.
- Gebruik de rijondersteuning door rustig tegen de duwbeugel te duwen. Laat de lift de kracht van jou overnemen.
- Om de lift zijwaarts te verplaatsen, verplaats uw handen naar de zijkant van de duwbeugel, het aandrijf wiel zal zijwaarts draaien. De lift neemt de kracht weer over.
- Duw/trek en draai nooit tegelijk. Alleen duwen/trekken of alleen draaien.
- De lift gaat na 15 minuten in de ruststand ("Start" lampje knippert) en start weer bij het aanraken van de duwbeugel. Na 30 minuten schakelt de lift automatisch uit.

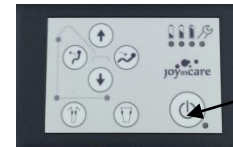

Kort indrukken



1. Bediening voor het omhoog of omlaag bewegen van de tilarm.
2. Bediening voor het positioneren van het tiljuk van zit naar lig en vice versa.
3. Bediening voor het openen en sluiten van het onderstel.
4. In geval van nood, druk de noodstop in om de lift uit te schakelen, zie tekening.

LET OP!

- Controleer altijd of de clips van de tilband goed aan de paddenstoeltjes bevestigd zijn. Zie voor een correct gebruik van de tilband de gebruiksaanwijzing van de tilband.
- De accu van de Touch&Move liften ontladst zichzelf langzaam en dient eens in de drie maanden volledig te worden opgeladen. Indien dit niet gebeurt kan de accu onherstelbaar beschadigd worden.
- Mocht de tillift tijdens gebruik onverhoopt uitvallen, kan met behulp van de nooddaalfunctie de cliënt gedaald worden.
- Wanneer de noodstop geactiveerd wordt, zal er gedurende 30 seconden een piepsignaal klinken en zal de lift niet reageren. Wanneer een lift wordt ingeschakeld terwijl de noodstop nog geactiveerd is, zal er bij opstarten ook een piepsignaal klinken van 30 seconden. Voor beide handelingen geldt ook dat het lampje bij de aan/uit knop gedurende 30 seconden op zal lichten.
- De noodstop wordt ontgrendeld middels een draaibeweging naar rechts.

