

# MoveUp stalift *touch&move*

---

Gebruiksaanwijzing



# 1. Voorwoord

Hartelijk dank voor uw keuze voor de MoveUp stalift.

De MoveUp stalift met Touch&Move onderstel is een product van JOYinCare. JOYinCARE richt zich op alle tiltransfer vraagstukken in de gezondheidszorg en maakt deel uit van de JOYinCARE Group.

Uw MoveUp stalift maakt deel uit van een complete serie Touch&Move personenliften uitgevoerd met een unieke technologie voor moeiteloos verrijden en manoeuvreren van de MoveUp stalift. U kunt op de website [www.joyincare.com](http://www.joyincare.com) meer informatie vinden over de complete serie tilliften met Touch&Move onderstel en onze overige producten.

Wij doen ons uiterste best om aan al uw wensen te voldoen en ervoor te zorgen dat wij u de beste service, training en advies bieden, zodat uw medewerkers optimaal en met veel plezier met de MoveUp stalift kunnen werken. Heeft u vragen over het gebruik van de MoveUp stalift neemt u dan a.u.b. contact met ons op. Wij vinden het belangrijk om continu in gesprek te zijn en te blijven met diegenen die onze producten gebruiken.

Deze gebruiksaanwijzing geeft de gebruiker en de onderhoudsmonteur informatie over veilig onderhouden van de MoveUp stalift Touch&Move.



- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door vóór u de MoveUp stalift in gebruik neemt. Alleen dan is een optimale veiligheid verzekerd.
- De MoveUp stalift mag enkel gebruikt worden door diegene die deze gebruiksaanwijzing hebben gelezen en begrepen, en zich aan de beschreven instructies houden.
- Jaarlijks onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd personeel.

JOYinCARE blijft voortdurend in beweging om de gebruikers van onze producten van dienst te kunnen zijn. Heeft u suggesties voor verbetering van onze producten of aanvullende ideeën voor ons productassortiment dan horen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groet,

Pim Krijnsen



JOYinCARE B.V.

De fabrikant houdt zich het recht voor deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Wij zullen in dat geval een nieuwe versie verstrekken. Op producten van JOYinCARE rusten octrooien. Informatie over deze octrooien is verkrijgbaar bij JOYinCARE B.V te Nunspeet. Wij volgen een beleid van voortdurende ontwikkelingen. Technische specificaties kunnen gewijzigd worden. Wij behouden ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de technische specificaties van onze producten te wijzigen.

© JOYinCARE

## 2. Inhoud

<b>1. Voorwoord</b>	<b>2</b>
<b>2. Inhoud</b>	<b>3</b>
<b>3. Inleiding</b>	<b>4</b>
3.1. Fabrikant	4
3.2. Gerelateerde documenten	4
3.3. Product identificatie / CE-markering	4
3.4. Copyright	4
3.5. Garantie	4
3.6. Aansprakelijkheid	4
<b>4. Veiligheid</b>	<b>5</b>
4.1. Veiligheidsymbolen in deze gebruiksaanwijzing	5
4.2. Definities	5
4.3. Belangrijke veiligheidsinstructies	5
<b>5. Productbeschrijving</b>	<b>6</b>
<b>6. Bediening van uw MoveUp stalift</b>	<b>10</b>
6.2. Het uitvoeren van een transfer met de MoveUp stalift	10
6.3. Voorbereiding	10
6.6. Gaan zitten met de MoveUp stalift	12
<b>7. Het gebruik van uw tilband</b>	<b>13</b>
<b>8. Service &amp; onderhoud</b>	<b>17</b>
<b>9. Opslag en transport</b>	<b>18</b>
9.1. Lange termijn opslag	18
9.2. Transport	18
<b>10. Milieutechnische aspecten</b>	<b>18</b>
<b>11. Beknopte foutopsporing</b>	<b>19</b>
<b>12. Garantie</b>	<b>19</b>
<b>13. Contactgegevens</b>	<b>20</b>
<b>14. Bijlage A: Technische gegevens</b>	<b>21</b>
<b>15. Bijlage B: Labels</b>	<b>23</b>

### 3. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt algemene informatie gegeven over de MoveUp stalift en deze gebruiksaanwijzing.

#### 3.1. Fabrikant

De MoveUp stalift is gefabriceerd door:

Indes BV  
Pantheon 28  
7521 PR, Enschede  
T.: 053-4803920  
F.: 053-4803922

info@indes.eu  
www.indes.eu

Mocht u vragen of problemen hebben, neem dan contact op met uw dealer.

#### 3.2. Gerelateerde documenten

Naast deze gebruiksaanwijzing is er voor de MoveUp stalift een servicehandleiding beschikbaar. Hierin wordt beschreven hoe routine onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

#### 3.3. Product identificatie / CE-markering

In onderstaande afbeelding is het productidentificatieplaatje van de MoveUp stalift te zien.



Het product heeft een CE-markering, wat inhoudt dat het product voldoet aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Europese Unie.

#### 3.4. Copyright

Copyright © JOYinCARE

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

#### 3.5. Garantie

De fabrikant geeft één jaar garantie op de MoveUp stalift. De fabrikant geeft geen garantie op onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage. Garantie is niet van toepassing op schade of gebreken die aan de MoveUp stalift kunnen zijn ontstaan door verkeerd gebruik of onkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling hiervan ligt bij de fabrikant, of een door haar aangewezen vertegenwoordiger.

De fabrikant houdt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen, in afwijking van hetgeen in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Hiervoor is geen verantwoording verschuldigd.

#### 3.6. Aansprakelijkheid

De fabrikant van de MoveUp stalift is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schade die gevolg zijn van:

- Het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op de MoveUp stalift of in deze gebruiksaanwijzing.
- Het gebruik van de MoveUp stalift voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Het aanbrengen van wijzigingen van de MoveUp stalift van enigerlei aard. Hieronder valt ook het toepassen van andere dan de voorgeschreven vervangingsonderdelen.
- Onvoldoende onderhoud.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij storingen aan het apparaat zoals schade aan producten, bedrijfsonderbreking, productieverlies, enzovoorts.

## 4. Veiligheid

In dit hoofdstuk worden veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de MoveUp stalift beschreven. Lees dit hoofdstuk aandachtig door voor u de MoveUp stalift in gebruik neemt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

### 4.1. Veiligheidsymbolen in deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen:



**Een tip of aandachtspunt.**



**Maakt attent op mogelijke problemen.**



**Gevaar voor schade aan de MoveUp stalift bij het niet zorgvuldig uitvoeren van de instructies.**



**Gevaar voor ernstige verwondingen van de gebruiker bij het niet zorgvuldig uitvoeren van de instructies.**

### 4.2. Definities

In deze gebruiksaanwijzing worden enkele definities gebruikt. Een toelichting van de definities is onderstaand te vinden.

#### **Cliënt**

De persoon die met de MoveUp stalift verplaatst wordt.

#### **Zorgverlener**

De persoon die de MoveUp stalift bedient.

#### **Transfer**

De handeling van tillen, verplaatsen en het weer laten zakken van de cliënt.

#### **Tilband**

Een niet vormvaste (textiel) lichaamsondersteuning voor gebruik in combinatie met de MoveUp stalift. De tilband ondersteunt de cliënt tijdens het uitvoeren van een transfer in de MoveUp stalift.

### 4.3. Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor gebruik. Dit is belangrijk voor de veiligheid van uw cliënt en uzelf.



**Waarschuwing!**

Til nooit een cliënt die meer weegt dan 200 kg.



**Waarschuwing!**

Til nooit meer dan één cliënt tegelijk.



**Waarschuwing!**

Laat een cliënt nooit zonder begeleiding achter in een MoveUp stalift.



**Waarschuwing!**

De MoveUp stalift is niet ontworpen voor blootstelling aan grote hoeveelheden water (stralen). De MoveUp stalift is niet geschikt voor gebruik onder de douche.



**Waarschuwing!**

De MoveUp stalift is niet geschikt voor gebruik op hellingen. Verrijd de MoveUp stalift nooit mét een cliënt in de MoveUp stalift over een helling.



**Waarschuwing!**

Stel de MoveUp stalift niet bloot aan temperaturen boven 50 graden Celcius.



**Waarschuwing!**

De elektrische aandrijving van de MoveUp stalift wordt bestuurd met sensoren in de duwbeugel. Zorg er te allen tijde voor dat de duwbeugel vrij kan bewegen en er geen krachten op de duwbeugel worden uitgeoefend, anders dan de krachten benodigd voor het voortduwen van de MoveUp stalift.

Hang geen kleding, tassen, tilbanden ect, aan de duwbeugel. Draag er zorg voor dat nooit objecten tussen de duwbeugel en de tilmast worden geplaatst of geklemd.



**Waarschuwing!**

Gebruik de MoveUp stalift in combinatie met tilbanden die door JOYinCARE zijn meegeleverd. U kunt deze tilbanden herkennen aan het etiket dat aan de binnenzijde van de tilband is bevestigd.



Controleer de MoveUp stalift regelmatig op loszittende delen en slijtage van bijvoorbeeld rubbers, banden of kunststof kappen. Stop in het geval u dit constateert onmiddellijk met gebruik van de MoveUp stalift en neem contact op met uw service afdeling of leverancier.




Om ongelukken, zoals beknelling tijdens het onderhoud aan de MoveUp stalift te voorkomen, is het alleen toegestaan onderhoud uit te voeren als de accu van de te onderhouden tillift verwijderd is.

De fabrikant/leverancier is niet verantwoordelijk voor schade en eventueel hieruit voortvloeiende gevolgschade in geval van molest, achterstallig onderhoud, onjuist gebruik en het afwijken van aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

## 5. Productbeschrijving

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over de MoveUp stalift componenten en de werking hiervan.

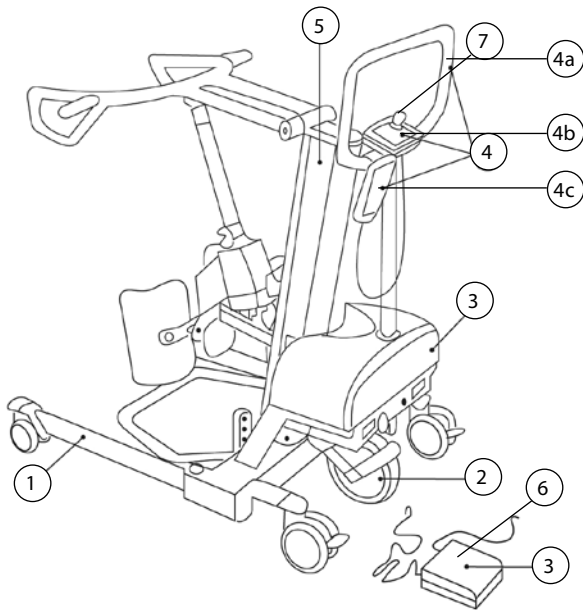

### Legenda

1. MoveUp onderstel
2. Elektrische ondersteuning, Touch&Move wiel
3. Elektronica box
- 4a Duwbeugel
- 4b Bedieningspaneel
- 4c Handbediening
5. Mast
6. Acculader
7. Noodstop

### MoveUp stalift onderstel

De MoveUp stalift is uitgevoerd met een onderstel met elektrisch spreidpoot mechanisme. Bediening van dit mechanisme vindt plaats op het bedieningspaneel of via de handbediening. De motor voor het spreiden van de poten bevindt zich in de middenbrug.

Het onderstel is voorzien van vier zwenkwielen. De twee achterste zwenkwielen zijn geremd. De remmen van deze wielen zijn met de voet te bedienen, door de voetbeugel naar beneden (remmen) of boven (ontgrendelen) te duwen.

De voetplaat van de MoveUp stalift heeft drie standen. Standaard wordt de voetenplaat in de middelste stand afgesteld. Voor individuele cliënten kan het nodig zijn vooraf de voetenplaat omhoog of omlaag te brengen. Dit kan door de schroefknoppen aan de voorzijde van de voetenplaat los te draaien, de voetplaat te verplaatsen en weer te bevestigen door de schroefknoppen aan te draaien.

Elektrische ondersteuning Touch&Move wiel  
Uniek aan de MoveUp stalift is het elektrische Touch&Move wiel dat zorg draagt voor moeiteloos verrijden en manoeuvreren van de MoveUp. Het wiel bevindt zich onder de elektronica box en kan elektrisch gedraaid en gestuurd worden.

Het wiel kan draaien tot een hoek van 90 graden zijdelings in beide richtingen. Besturing van het wiel is mogelijk via de duwbeugel (4a). Bij voorwaarts en achterwaarts verrijden van de MoveUp stalift biedt het elektrische wiel een 100% elektrische ondersteuning van ca. 5 km per uur. Bij zijwaarts verrijden biedt dit wiel elektrische ondersteuning van 50% snelheid van ca. 2,5 km per uur.

Het wiel is voorzien van een polyurethaan loopvlak. Het wiel wordt met behulp van een veer tegen de vloer gedruwd. Voor het nemen van drempels en obstakels kan het wiel enkele centimeters omhoog en omlaag bewegen.



**Waarschuwing!**  
Het Touch&Move wiel mag alleen verwisseld worden door gekwalificeerd service personeel.

### Elektronica box en acculader

Op de middenbrug van het onderstel bevindt zich een opbouw met omkapping waarin een elektronica box geplaatst is. Deze elektronica box bevat alle elektronica die nodig is voor het besturen van de Touch&Move technologie en de mast.



**Waarschuwing!**  
De omkapping van de elektronica box mag alleen verwijderd worden door service personeel gekwalificeerd door de fabrikant/leverancier.

Onder de omkapping bevindt zich naast elektronica ook de accu. Deze accu hoeft tijdens normaal gebruik niet gewisseld te worden. De accu kan opgeladen worden met de bijgeleverde Touch&Move acculader.




**Waarschuwing!**  
Laad Touch&Move producten (MoveUp stalift) alleen op met de bijgeleverde MoveUp stalift acculader. Gebruik van andere acculaders kan de MoveUp stalift beschadigen.



**Waarschuwing!**  
De acculader is ontworpen voor gebruik in een droge omgeving. De acculader is niet geschikt voor gebruik in badkamers en andere natte ruimtes

### Acculader

Voor het opladen van de MoveUp stalift dient het klepje aan de achterzijde van het onderstel geopend te worden. Het opladen begint zodra de oplaadconnector is aangebracht en de acculader op het lichtnet is aangesloten.

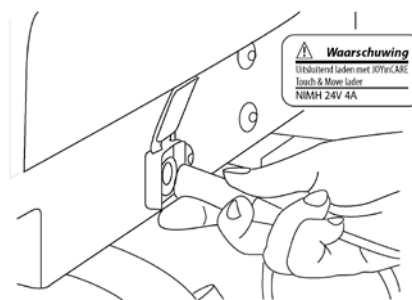

Op de acculader bevindt zich 1 indicatielampje. Zodra de acculader is aangesloten gaat het lampje rood branden en wordt de accu opgeladen. Als het lampje groen gaat branden is de accu vol en kan de stekker uit het stopcontact.

Indien een MoveUp stalift aan staat, of aangezet wordt tijdens het opladen van de batterij, zal de batterijindicatie korte tijd een animatie laten zien van oplopende groene lampjes. Daarna schakelt de MoveUp stalift uit. Tijdens het opladen kan de MoveUp stalift niet gebruikt worden. Alle liftfuncties worden uitgeschakeld.



**Waarschuwing!**  
De accu van de MoveUp stalift ontladtd zichzelf langzaam. De accu dient derhalve minimaal eens in de drie maanden volledig te worden opgeladen. Indien dit niet gebeurt kan de accu onherstelbaar beschadigd worden.


Op de accu wordt een garantie gegeven van minimaal 500 oplaadcycli of 2 jaar. Een teller in de elektronica houdt dit aantal oplaadcycli bij en kan door servicepersoneel uitgelezen worden.

#### Duwbeugel, bedieningspaneel en handbediening

Zowel het bedieningspaneel, gemonteerd in het midden van de duwbeugel en de duwbeugel zelf spelen een rol in de bediening van de MoveUp stalift.


De duwbeugel is voorzien van sensoren die meten hoeveel kracht, en in welke richting die kracht op de duwbeugel wordt uitgeoefend. Hierdoor is het mogelijk om, door alleen de duwbeugel vast te houden en in een bepaalde richting te duwen, de mate van elektrische ondersteuning en de richting van de elektrische ondersteuning te bepalen. Op het bedieningspaneel is een aantal bedieningsknoppen en indicatielampjes te vinden.

1. GO bedieningsknop
2. GO indicatie
3. Bedieningsknoppen spreidpoten
4. Bedieningsknoppen liftbeweging
5. Noodstop
6. Noodstop indicatie
7. Wielrichting indicatie
8. Service indicatie
9. Batterij indicatie

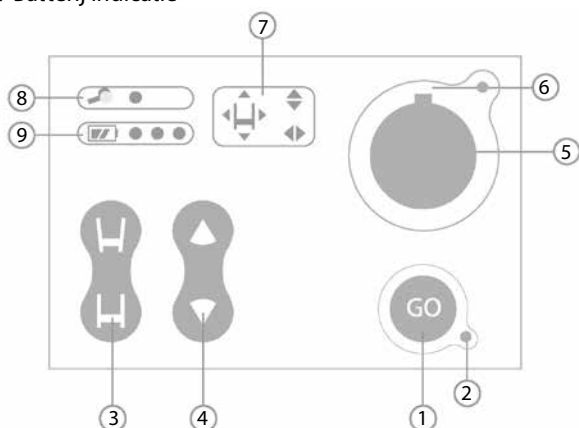

Aan de onderzijde van het bedieningspaneel bevindt zich een connector voor een handbediening. Op deze handbediening zijn enkele bedieningsknoppen, die ook op het bedieningspaneel te vinden zijn, geplaatst.

3. Bedieningsknoppen spreidpoten
4. Bedieningsknoppen liftbeweging

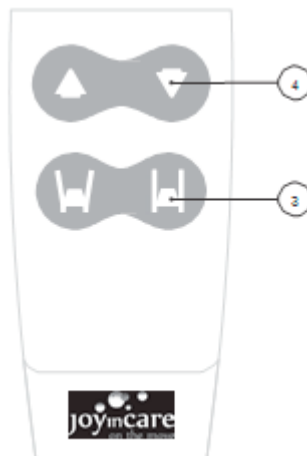

#### Duwbeugel

De duwbeugel van de MoveUp stalift is voorzien van sensoren die de kracht, die op de duwbeugel wordt aangebracht, kunnen meten. Deze sensoren meten de grootte van die kracht, maar ook de hoek waaronder tegen de duwbeugel wordt geduwd; bij recht naar voren, opzij, of schuin naar achteren. Mocht de MoveUP stalift in standby staan dan zijn de sensoren gedeactiveerd. Zij kunnen geactiveerd worden door kort op de GO bedieningsknop op het bedieningspaneel te drukken.

Met het signaal van de sensoren wordt het Touch&Move wiel aangedreven en gestuurd. Wordt tegen de duwbeugel geduwd, dan reageert het Touch&Move wiel door krachtondersteuning te geven.

Wordt schuin naar voren tegen de duwbeugel geduwd, dan gaat ook het Touch&Move wiel in een schuine stand naar voren staan. Wordt alleen tegen de zijkant van de duwbeugel geduwd, dan gaat het Touch&Move wiel volledig zijwaarts draaien en krachtondersteuning in zijwaartse richting geven.

Wanneer de MoveUp stalift stil staat en tegen de zijkant van de duwbeugel wordt geduwd, gaat het wiel volledig zijwaarts draaien. Met de MoveUp stalift kan nu een zijwaartse manoeuvre worden uitgevoerd. Wanneer de MoveUp stalift zijwaarts is verreden, en de duwbeugel losgelaten wordt, gaat het Touch&Move wiel na 2 seconden automatisch terug naar de voorwaartse stand.

Wanneer u met de MoveUp stalift rijdt en tegen de zijkant van de duwbeugel wordt geduwd, zal het Touch&Move wiel langzaam steeds verder zijdelings draaien. Met de stalift kan nu een bocht gereden worden.

Het besturen van de MoveUp stalift gaat het best wanneer rustig tegen de duwbeugel geduwd wordt. De elektrische ondersteuning krijgt dan voldoende tijd om de stalift in beweging te brengen, zodat geen eigen kracht gebruikt hoeft

te worden bij het bewegen. Wanneer een te grote kracht op de duwbeugel wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld wanneer de MoveUp stalift vanuit stilstand met grote kracht wordt aangeduwd kan het voorkomen dat de sensoren zich opnieuw in moeten stellen. Het Touch&Move wiel wordt dan uitgeschakeld en de service indicatie gaat gaan knipperen. Om de tien seconden klinkt een korte pieptoon. Wanneer de beugel losgelaten wordt, worden de sensoren na enkele seconden opnieuw ingesteld. Raak tijdens dit instellen de duwbeugel niet aan. Na correct instellen gaat de service indicatie uit, en word het Touch&Move wiel weer ingeschakeld.



#### Waarschuwing!

Voorkom dat grote (piek)krachten op de duwbeugel worden uitgeoefend. De sensoren kunnen hier in extreme gevallen onverwacht op reageren.

#### Activeren

Met de GO bedieningsknop (1) kan de MoveUp stalift aanzet worden. Druk hiervoor de bedieningsknop gedurende twee seconden in. Na deze twee seconden gaan alle indicatielampjes op het bedieningspaneel branden. Laat het bedieningspaneel en de duwbeugel vervolgens los. De MoveUp stalift heeft gemiddeld zo'n 4 a 5 seconden nodig om zichzelf in te stellen. Na het doorlopen van de instelprocedure hoort u een klik en licht de GO indicatie (2) groen op. De MoveUp stalift is dan klaar voor gebruik. De duwbeugel mag weer vastgepakt worden.



#### Waarschuwing!

Laat de duwbeugel en het bedieningspaneel altijd los direct nadat de MoveUp stalift is aanzet. De sensoren in de duwbeugel waarmee de MoveUp stalift bestuurd wordt hebben zo'n 4 a 5 seconden nodig om zichzelf in te stellen. Zorg ervoor dat tijdens dit instellen geen krachten op de duwbeugel worden uitgeoefend. Trek niet aan de duwbeugel, maar laat deze los. Hang geen kleding, tassen, tilbanden ect. aan de duwbeugel. Draag er zorg voor dat nooit objecten tussen de duwbeugel en de tilmast worden geplaatst of geklemd.

De MoveUp stalift kan uitgezet worden door de GO bedieningsknop, wederom drie seconden in te drukken. Wanneer de MoveUp stalift een uur niet gebruikt is, gaat deze automatisch uit.

Na 30 minuten niet gebruikt te zijn schakelt de MoveUp stalift lift automatisch op standby. De GO indicatie gaat dan knipperen. Om de elektrische ondersteuning weer aan te zetten dient de GO bedieningsknop kort ingedrukt te worden.

#### Bediening spreidpoten

Met de bedieningsknoppen voor de spreidpoten (3) wordt het elektrisch spreidpoot mechanisme geactiveerd. Na indrukken van de bovenste knop zullen de poten zich automatisch spreiden. Na indrukken van de onderste knop zullen de poten weer sluiten. De spreidpoten bewegen zolang de bedieningsknoppen ingedrukt blijven en tot de eindstanden bereikt zijn.

#### Bediening lift


Met de bedieningsknoppen voor de liftbeweging (4) kan de tilmast omhoog en omlaag gezet worden en kan de cliënt getild worden. Na indrukken van de bovenste knop gaat de liftarm stijgen. Na indrukken van de onderste knop gaat de liftarm dalen. Het spreiden van de poten van het onderstel en het heffen en dalen van de hefarm van de MoveUp kunnen onafhankelijk van het Touch&Move onderstel gebruikt worden, dus ook als het Touch&Move onderstel in de slaapstand staat. De knoppen voor het spreiden en heffen kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.

#### Bediening noodstop

Met de noodstop (5) worden alle motoren van de MoveUp stalift direct uitgeschakeld. De bedieningsknoppen en de duwbeugel werken dan niet. De noodstop kan geactiveerd worden door de rode knop naar beneden te drukken. Gebruik deze noodstop alleen in noodgevallen. De noodstop kan weer ontkoppeld worden door de knop te draaien. De knop komt dan omhoog. Indien de noodstop is ingedrukt en de MoveUp stalift aan staat gaat de noodstop indicatie (6) oranje oplichten. Alle andere indicaties gaan uit. Wanneer de MoveUp stalift aanzet wordt terwijl de noodstop is ingedrukt, gaat de noodstop indicatie na korte tijd oranje oplichten.

#### Wielrichting indicatie

De wielrichtingindicatie (7) geeft de richting van het Touch&Move wiel weer. Indien het Touch&Move wiel in voorwaartse richting staat of wanneer een bocht gereden wordt, zal de bovenste indicatie, met pijlen in voorwaartse richting, groen oplichten. Wanneer het Touch&Move wiel in volledig zijwaartse richting staat, zal de onderste indicatie, met pijlen in zijwaartse richting, oranje oplichten.

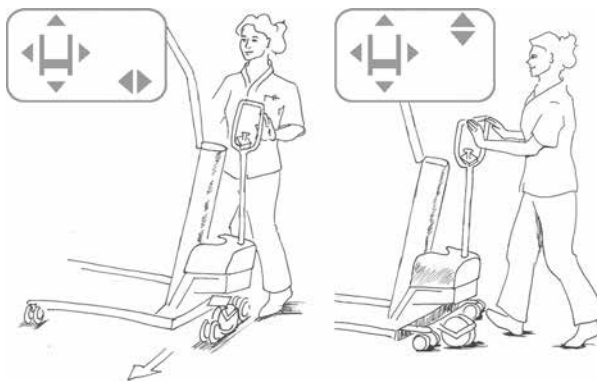

#### Service indicatie

De service indicatie (8) geeft aan wanneer service aan de MoveUp stalift verricht dient te worden. Na 230 uur activiteit van het Touch&Move wiel, of 160 uur activiteit van de MoveUp stalift gaat de service indicatie continu oranje oplichten. U wordt geadviseerd dan contact op te nemen met uw leverancier voor jaarlijks onderhoud van uw MoveUp stalift. Na onderhoud door gekwalificeerd servicepersoneel wordt deze indicatie weer uit gezet.

Indien de service indicatie oranje knippert en na aan en uitzetten van de MoveUp stalift blijft knipperen, vindt een storing in het elektrisch systeem plaats en is direct onderhoud



vereist. Neem in dit geval contact op met uw leverancier. Afhankelijk van het type storing; in de Touch&Move aandrijving of in de liftbeweging, kunnen een of meerdere motoren niet meer werken zolang de indicatie knippert.



**Waarschuwing!**  
Gebruik de MoveUp stalift niet indien de oranje service indicatie na in- en uitschakelen blijft branden. Rond de transfer waar u mee bezig bent spoedig af, en neem zo snel mogelijk contact op met uw leverancier.

#### Batterij indicatie

De batterijindicatie (9) geeft aan hoe vol de batterij nog is. Indien de batterij volledig geladen is branden drie groene lampjes. Is de batterij nog voor 45 tot 70 % vol dan branden twee groene lampjes. Is de batterij nog voor 20 tot 45 % vol dan brandt één groen lampje. Zodra de batterij voor minder dan 20 % vol is, zal één rood lampje gaan branden.

U wordt geadviseerd de MoveUp stalift dan aan de oplader aan te sluiten.

Wanneer de batterij bijna leeg is gaat het rode lampje knipperen. Er is dan voldoende stroom over om een transfer af te maken. U kunt echter niet meer aanvangen met een nieuwe transfer. De opgaande beweging van de lift functioneert niet meer. Wanneer u door blijft werken met uw MoveUp stalift, als de batterij bijna leeg is, gaat een piepsignaal klinken. De MoveUp stalift krachtondersteuning wordt uitgeschakeld. U kunt de MoveUp stalift nu enkel nog laten dalen en de spreidpoten openen en sluiten.

#### Handbediening

De handbediening bevat bedieningsknoppen voor de liftbeweging en voor de spreidpoten. Bediening van deze functies kan zowel op het bedieningspaneel als op de handbediening worden uitgevoerd. De handbediening is voorzien van een flexibel spiraalsnoer. Dit maakt het mogelijk de MoveUP stalift te bedienen vanuit een positie naast de cliënt.




**Waarschuwing!**  
De MoveUp stalift is geschikt voor het tillen van personen tot 200 kg. Til nooit personen boven dit gewicht.

#### Mast

De MoveUp stalift is voorzien van een mast waarmee een actieve tilbeweging gemaakt kan worden. De MoveUp stalift bestaat uit een mastgedeelte en een tilraam. Met behulp van een motor wordt het tilraam gedraaid.

De motor is voorzien van een nooddaalfunctie. Mocht de MoveUp stalift tijdens het maken van een transfer onverhoopt uitvallen, dan kan met behulp van deze functie de cliënt gedaald worden. Beweeg voor het activeren van de nooddaalfunctie de rode schuif op de motor omhoog. De nooddaalfunctie werkt alleen wanneer het tilraam belast is. Het dalen start met een kleine vertraging.

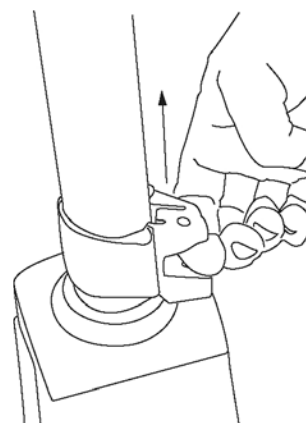

Het tilraam is voorzien van twee bevestigingspunten voor beveiligingsclips. Gebruik de MoveUp stalift alleen in combinatie met tilbanden van JOYinCARE.

Het tilraam is voorzien van twee sets handvatten voor de cliënt. Deze kunnen gebruikt worden naar voorkeur van de cliënt.

Voor het doorlopen van een comfortabele sta-op-beweging zijn de beensteunen van de MoveUp verend opgehangen. De beensteunen bewegen tijdens het opstaan mee met de onderbenen van de cliënt. Verkrijgbaar in 2 varianten, flexibel en een stuggere.

## 6. Bediening van uw MoveUp stalift

In dit hoofdstuk wordt de juiste volgorde van gebruik omschreven van de MoveUp stalift.

De MoveUp stalift maakt deel uit van een serie elektrisch vrijrijdbare personenliften uitgevoerd met de unieke Touch&Move techniek voor moeiteloos verrijden.

De MoveUp stalift is een actieve vrijrijdbare stalift voor personen, speciaal geschikt voor gaan staan, gaan zitten en toiletteren.

De MoveUp stalift wordt gebruikt voor verplaatsing tussen bed en rolstoel en naar- en van het toilet.

### 6.1. Het verrijden van de MoveUp stalift



Controleer of de kabel van de acculader afgekoppeld is.



Controleer het batterijniveau op het bedieningspaneel. Er dient minimaal één groen lampje te branden.



Controleer voordat u gaat rijden of het groene indicatielampje van de GO (1) op het bedieningspaneel brandt. Indien deze groen knippert staat het Touch&Move onderstel van de MoveUp stalift in de slaapstand. U activeert het Touch&Move onderstel door kort op de GO bedieningsknop te drukken.




Controleer of de noodstop niet ingedrukt is. Het oranje indicatielampje (6) zal oplichten indien dit het geval is. Ontkoppel de noodstop door de knop in de richting van de pijlen te draaien.



Controleer of het oranje indicatielampje (8) bij het sleuteltekentje op het display niet brandt. Knippert het indicatielampje langdurig oranje dan is er een storing van het Touch&Move onderstel en kan deze niet gebruikt worden.

Duw voor het verrijden van de MoveUp stalift rustig met twee handen tegen de duwbeugel. Houdt u bij het verrijden van de MoveUp stalift aan de regels zoals deze voor het verrijden van staliften zijn vastgelegd. De MoveUp stalift kan dan zonder krachtsinspanning verreden worden.

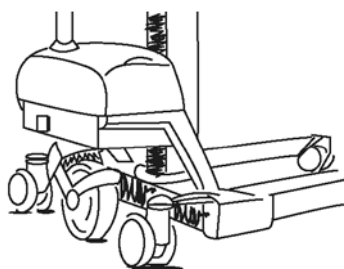

Wanneer u een volledig zijwaartse manoeuvre wilt maken dient u te wachten tot de stalift volledig stilstaat. Door vervolgens tegen de zijkant van de duwbeugel te duwen zal het Touch&Move wiel volledig zijwaarts draaien en kan de manoeuvre uitgevoerd worden. Om weer in voorwaartse richting verder te rijden dient de duwbeugel kort losgelaten te worden. De richting van het Touch&Move wiel kan gecontroleerd worden met de wielrichting indicatielampjes op het bedieningspaneel.

### 6.2. Het uitvoeren van een transfer met de MoveUp stalift

De MoveUp stalift dient uitsluitend te worden bediend door een aantoonbaar bekwaam persoon. Deze persoon dient getraind te zijn in het gebruik van de MoveUp stalift en is bekend met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

### 6.3. Voorbereiding



Controleer in het zorgdossier of er lichamelijke veranderingen zijn van de cliënt. Kies voordat u gaat tillen de juiste maat en model tilband en leg deze klaar.



Controleer of de tilband geschikt is voor het gebruik met de MoveUp stalift.

Rijdt de MoveUp stalift binnen handbereik. Bepaal of de cliënt door 1 persoon met de MoveUp stalift getild kan worden, vraag indien nodig een extra persoon. Leg de cliënt uit wat u gaat doen.


Breng de tilband aan terwijl de cliënt stabiel op de rand van het bed zit of breng de tilband aan in de rolstoel. Indien de cliënt onvoldoende rompbalans heeft, is een tweede hulpverlener noodzakelijk.

Breng het midden van de rugsteunband op de rug aan onder de schouderbladen. Breng de uiteinden van de rugsteunband onder de oksels door. Controleer of de uiteinden even lang zijn. Maak de buikfixatie vast en trek deze aan.



Wanneer de tilband is aangebracht, rijdt u de MoveUp tillift naar de cliënt toe. Spreid indien nodig het onderstel. Zorg ervoor dat de hefarm van de stalift naar beneden staat. Let op eventuele uitstekende obstakels zoals stoelleuning of een werkblad.

Rijd de MoveUp stalift tot voor de cliënt. Til de voeten van de cliënt op en zet deze op de voetenplaat, of laad de cliënt dit zelf doen. Let erop dat beide voeten geheel op de voetenplaat staan. Rijdt indien nodig de MoveUp stalift dichterbij, zodat de onderbenen van de cliënt volledig contact maken met de kniesteun van de MoveUp stalift. Bevestig de clips van de rugsteunband aan de paddenstoeltjes van de MoveUp stalift. Controleer of deze goed zijn aangebracht.

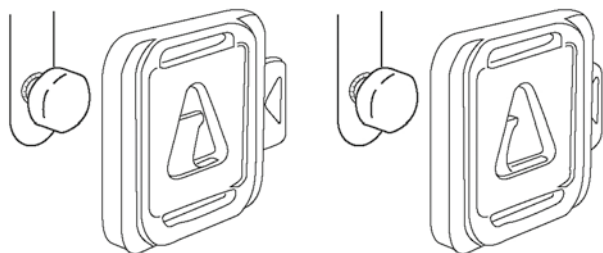


#### 6.4. Het tillen met de MoveUp stalift

De MoveUp stalift hoeft niet op de rem gezet te worden tijdens het tillen. Laat de cliënt met één hand of beide handen de handvatten op de hefarm vastpakken of laat de cliënt beide handen vasthouden voor de buik. Nodig de cliënt uit, indien mogelijk, mee te helpen tijdens het gaan staan. Indien de cliënt voldoende stafunctie heeft kunnen de knieën van de cliënt loskomen van de kniesteun.

Begin met tillen van de cliënt door de hefarm omhoog te bewegen. Let u erop dat de rugsteunband op de juiste plaats blijft zitten.

Indien de cliënt onwel wordt of andere ongemakken aan geeft dient u de tilhandeling direct te staken en de cliënt weer terug te brengen in de rolstoel of op de rand van het bed. Zodra u de knop voor het heffen op afstandsbediening los laat, stopt de handeling direct. Door het indrukken van de noodstop zullen alle functies van de MoveUp stalift stoppen.

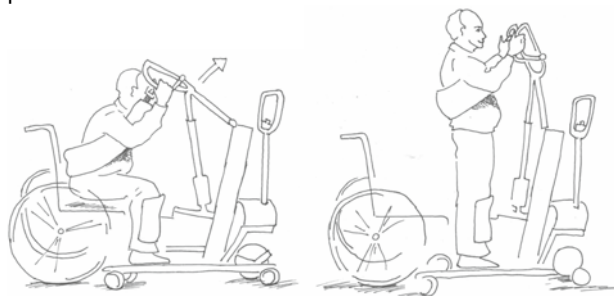

Rijdt de MoveUp stalift naar achteren, weg van de rolstoel of het bed. Controleer de kleding van de cliënt. (Na het toiletteren de kleding weer aanbrengen) Breng de poten van de MoveUp stalift weer naar binnen, zodat u makkelijker door de deuropening kan rijden. Verrijd de MoveUp stalift naar de gewenste locatie bijvoorbeeld het toilet, een rolstoel of het bed. Het is door de unieke Touch&Move mogelijk naast de cliënt te lopen tijdens het rijden. U heeft dan de duwbeugel vast en tegelijkertijd ook de cliënt. U kunt ook achter de MoveUp stalift lopen.



Controleer tijdens het verrijden of de cliënt stabiel staat.



Controleer of de rugsteunband goed blijft zitten.



#### 6.5. Het verplaatsen van de MoveUp stalift

Rijd de MoveUp stalift naar achteren, weg van de rolstoel of het bed. Controleer de kleding van de cliënt.

Breng de poten van de MoveUp stalift weer naar binnen, zodat u makkelijker door de deuropening kan rijden. Verrijd de MoveUp stalift naar de gewenste locatie, bijvoorbeeld het toilet, de rolstoel of het bed.



Controleer tijdens het verrijden of de cliënt stabiel staat.



Controleer of de rugsteunband goed blijft zitten.

## 6.6. Gaan zitten met de MoveUp stalift

Rijd de MoveUp stalift tot aan de rolstoel, het bed of het toilet. Spreid indien nodig de poten van de MoveUp stalift. Zet de MoveUp stalift nooit op de rem tijdens het gaan zitten. Zo kan de MoveUp stalift meebewegen tijdens het gaan zitten als de cliënt de zitting van het bed, de rolstoel of toilet raakt.

Verwijder indien nodig de kleding van de cliënt voor de toiletgang.

Laat dan de hefarm zakken zodat de cliënt volledig kan gaan zitten op de rand van het bed, de zitting van de rolstoel of de zitting van het toilet. Controleer of de cliënt stabiel zit.

Mocht u tijdens de toiletgang van de cliënt, de cliënt alleen laten, zet u de MoveUp stalift op de rem. Wacht vervolgens tot het lampje naast de GO-bedieningsknop groen knippert. Het Touch&Move onderstel staat nu in de slaapstand. Controleer altijd voordat u wegloopt of de cliënt alleen gelaten kan worden.

Maak de clips los van de hefarm. Maak de buikfixatie los en verwijder de rugsteunband. Til de voeten van de cliënt één voor één van de voetenplaat of laat de cliënt dit zelf doen.



Controleer of de cliënt veilig zit en rijd dan de MoveUp stalift weg.

## 7. Het gebruik van uw tilband

### **Tilband omschrijving**

Een tilband is een niet vormvaste lichaamsondersteuning voor het gebruik in combinatie met een personen tillift. Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, wordt gefabriceerd volgens de EN-ISO10535 norm en is gekenmerkt met het CE keurmerk.

### **Type personenlift**

#### **Stalift**

De cliënt heeft enige stafunctie. De stalift ondersteunt de cliënt in het gaan staan/zitten.

Uitvoering: Manueel/Touch&Move verrijdbaar.

#### **Passieve tillift**

De cliënt wordt volledig ondersteund door de tilband.

Uitvoering: Manueel verrijdbaar/plafond/rail/Touch&Move verrijdbaar.

### **Maximaal draaggewicht**

Tilbanden geleverd door JOYinCARE, zijn gegarandeerd tot het tillen van cliënten tot 200 kg. Op maat gemaakte banden kunnen daarop een uitzondering zijn.



Controleer vóór het gebruik van een door JOYinCARE geleverde tilband tot hoeveel kilogram tilgewicht de tillift gegarandeerd is. Indien de tillift een lager maximum tilgewicht heeft dan de tilband, dient u zich aan het tillift maximum te houden.

### **Baleinen**


Indien de tilband geleverd is met baleinen dienen deze gebruikt te worden tijdens de transfers.

### **Tilband bevestiging**

Een tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een tiljuk van een personen tillift door middel van clips of lussen.

#### **A) Door middel van clips:**

De clips van de tilband bevestigen aan het tiljuk van de tillift. De clip kan geplaatst worden door het schuifje aan de zijkant van de clip in te drukken. De opening die nu ontstaat, over het paddenstoeltje van het tiljuk te plaatsen en daarna het schuifje los te laten. Controleer altijd voor het tillen of de clip goed dicht zit.

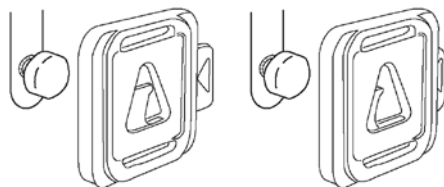

Clip open: Druk het schuifje in voor het afhalen van de clip van de paddenstoel.


Clip dicht: De clip sluit zich automatisch af na het plaatsen.

#### **Conformiteit**

De Careclip is een universele veiligheidsclips en kan veilig gebruikt worden in combinatie met elke gangbare tillift welke uitgerust is met een 4 punts tiljuk waarvan de spanbreedte tussen de schouder ophangpunten maximaal 62

cm bedraagt en is uitgevoerd met paddenstoeltjes met een diameter van 6.8 mm tot en met 8.2 mm. De Careclips aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden worden gefabriceerd volgens de EN-ISO10535 norm en zijn gekenmerkt met het CE keurmerk. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens de EN-ISO 10535 norm.

#### **B) Door middel van lussen:**

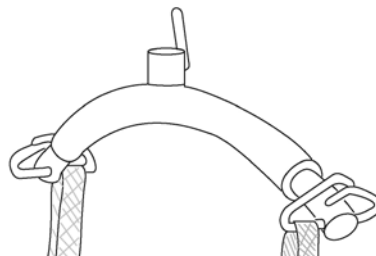

De lussen van de tilband bevestigen aan het tiljuk van de tillift. Controleer altijd manueel en visueel of alle clips of lussen goed zijn aangebracht alvorens te gaan tillen. Ook tijdens de tilhandeling nogmaals controleren.

#### **Conformiteit:**

De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met elke gangbare tillift welke uitgerust is met een tiljuk met haken.

#### **Type tilbanden**

Bij onduidelijkheid, ofwel bij de toepassing van, of de keuze voor een type tilband, altijd advies vragen aan de leverancier.

#### **A) Rugsteunband/corsetband**

Gebruik in combinatie met een stalift ter ondersteuning van het gaan staan of zitten. Controleer de stafunctie en schouderfunctie van de cliënt voor elke tilhandeling.

#### **B) Toiletband**

Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Laat het zitgedeelte vrij. Controleer de schouderfunctie van de cliënt voor elke tilhandeling. Evalueer de toepassing van een toiletband regelmatig, in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt, bijvoorbeeld afname van het lichaamsgewicht, na beenamputatie, etc.

#### **C) Standaard tilband**

Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Voor bad, douche- en algemeen gebruik. Controleer de juiste maat bij gebruik zonder kleding.

#### **D) VIP tilband**

Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Een verblijfs-tilband voor zit- of ligorthese. Loopt onder het zitvlak door. Kan niet in zitpositie aangebracht of weggehaald worden.


#### **E) Longseat**

Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Een verblijfs-tilband voor zit- of ligorthese. Loopt onder het zitvlak door. Kan niet in zitpositie aangebracht of weggehaald worden. In combinatie met een 4 punts tiljuk alleen gebruiken in combinatie met een verbredingsstang.

### **Tilband aanbrengen in zitpositie**

Bedoeld voor het tillen met een standaard tilband, rugsteunband en een toiletband.


1. Breng de standaard tilband aan tot op de (rol)stoel zitting. De toiletband tot aan de broekriem, de staliftband onder de schouderbladen / onderrug.
2. Sluit de okselsluiting van de toiletband. Sluit de buikfixatie van de staliftband. Plaats de armen van de cliënt over de staliftband / toiletband.
3. Haal de beenslips langs de benen naar voren van de standaard tilband en toiletband.
4. Trek de standaard tilband onder de stuit van de cliënt door met één hand aan de beenslip te trekken en met de andere hand tegen de knie duwen.
5. Haal de beenslips van de standaard tilband en toiletband één voor één onder de bovenbenen door. Plaats de baleinen in de hoofdsteun.
6. Bevestig nu de tilband aan het tiljuk.

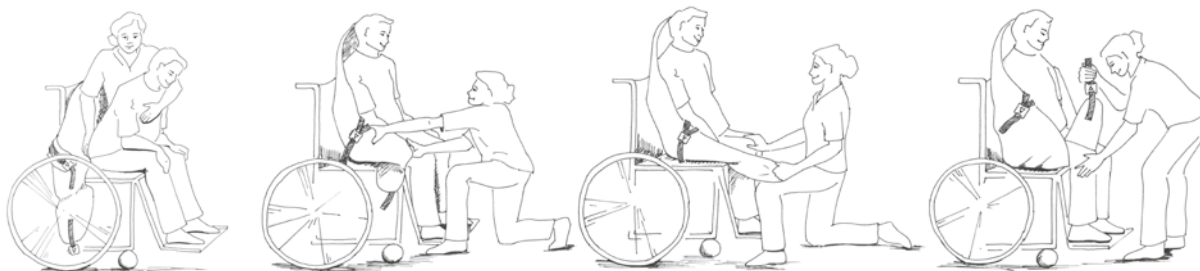

### **Tilband aanbrengen in ligpositie**

Bedoeld voor het tillen met een standaard tilband, toiletband, VIP tilband, longseat.

1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Bij de Standaard tilband, breng aan van kruin tot stuit. Bij een VIP tilband of longseat, breng aan tot over de stuit. Bij een toiletband, breng aan tot aan de broekriem
3. Breng daarna de beenslip en de schouderclip onder de cliënt door.

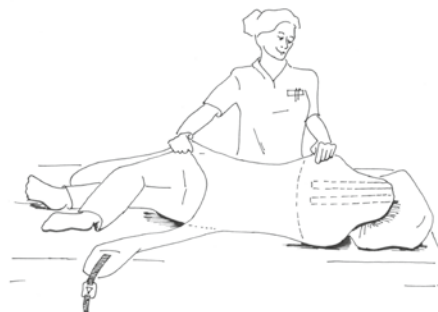

**Toiletband  
Standaard tilband  
VIP tilband, (longseat tot  
knieholte).**

4. Draai de cliënt terug op de rug. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door.
5. Plaats de baleinen in de hoofdsteun. Sluit de okselsluiting van de toiletband. Bevestig de tilband aan het tiljuk.



Controleer altijd of de clips of lussen goed zijn aangebracht alvorens te gaan tillen. Zorg ervoor dat de handen, armen, hoofd van de cliënt steeds binnen de tilband bevinden (met uitzondering van de toiletband).

## Maten

Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt. In ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt.

kleur	maat	Lichaamslengte	borstomvang	Bij fors postuur	lichaamsgewicht
Wit	XXS	<100 cm	53-67 cm	gebruik XS	tot 200 kg
Bruin/zwart	XS	100-125 cm	67-76 cm	gebruik S	tot 200 kg
Rood	S	125-145 cm	76-87 cm	gebruik M	tot 200 kg
Geel	M	145-165 cm	87-97 cm	gebruik L	tot 200 kg
Groen	L	165-185 cm	97-112 cm	gebruik LL	tot 200 kg
Paars	LL	165-185 cm	112-127 cm	gebruik XL	tot 200 kg
Blauw	XL	>185 cm	112-127 cm	gebruik XXL	tot 200 kg
Oranje	XXL	>185 cm	>127 cm	gebruik XXXL	op aanvraag



Controleer altijd of de clips of lussen goed zijn aangebracht alvorens te gaan tillen.

Zorg ervoor dat de handen, armen, hoofd van de cliënt steeds binnen de tilband bevinden (met uitzondering van toiletband).

## Materialen

Polyester, katoen, bamboe, polipropyleen, nylon.

## Onderhoudsvoorschriften




Controleer vòòr het in gebruik nemen van elke tilband de wasvoorschriften vermeld op het label van de tilband. Voor behoud van de tilband is het beter om de tilband in een waszak te wassen.

Verwijder de baleinen voor het wassen uit de tilband. Plaats de baleinen weer terug in de tilband voordat u weer gaat tillen.




Tilbanden niet in de droger. Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen tijdens de was-, en droogprocedure. Hierdoor kunnen onderdelen van de tilband beschadigen.

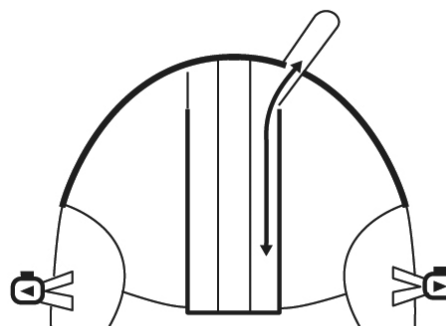

Tilbanden niet heter wassen dan 60° C. Gebruik geen wasmiddel of schoonmaakmiddel met oplosmiddel of bleekmiddel. Tilbanden niet strijken. Was de tilband bij voorkeur in een wasnet.

U krijgt een garantie voor elke geleverde tilband van 2 jaar en/of 200 wasbeurten op basis van de garantiebepalingen.

Controleer elke tilband en clips of lussen vóór elk gebruik op scheuren en wijkende delen, naden, stiksels. Vul het tilband logboek na elke wasbeurt in, maar minimaal 1 keer per maand. Bij gebleken gebreken of enige twijfel de tilband direct vervangen.




Leverancier: JOYinCARE Tel.0341-768080  
 Industrierweg 47 8071 CS Nunspeet

**⚠ Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing.**  
 Gebruik de tilband alleen met een passend tijk. Kies de juiste maat en model voor iedere cliënt. Voor gebruik de tilband, clips en lussen controleren op gebreken.  
 Bij gebreken de tilband niet gebruiken.

**⚠ Max gewicht 200Kg**

<p><b>Model</b></p> <p>VIP verblijfsband ZCP</p> <p>Standaard zonder balijnen</p> <p>Longseat met beenslips</p> <p>Toiletband met hoofdsteun met buikfixatie</p> <p>Staliftband corset schuim</p> <p>Loopvest Special</p>	<p><b>Maat</b></p> <p>XXS XS S M L LL XL XXL</p> <p><b>Materiaal</b></p> <p>Polyester net Bamboestretch Katoenstretch Katoen Polyester Special</p> <p><b>Ophanging</b></p> <p>Lussen Clips Special Obesitas 300 KG</p>
---	--



Fabrikant: Confexion bv Tel.0592-268953  
 Industrierweg 14 9403 AA Assen

B	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
T	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Model ←

Max tilgewicht →

Maat →

Materiaal →

Ophanging →

Wasvoorschrift →

CE →

Naam cliënt ←



## 8. Service & onderhoud

Dit hoofdstuk bevat informatie over de service en onderhoud van de MoveUp stalift.

De MoveUp stalift kan het best worden schoongemaakt met een goed uitgeknepen vochtige doek. Gebruik voor het schoonmaken een gewoon, niet agressief, schoonmaakmiddel.

Het is verstandig aan de volgende punten bij dagelijks gebruik aandacht te geven.



Controleer of alle functies van de MoveUp stalift nog goed werken. Breng de tilarm volledig naar boven en beneden, controleer de kantelfunctie van het tiljuk, spreid de poten volledig, test de noodstop en test of de elektrische Touch&Move ondersteuning naar behoren functioneert. Neem bij storingen contact op met uw leverancier.



Controleer voor ieder gebruik de bevestigingsclips aan de tilbanden op slijtage.



Controleer de tilband en met name de lussen van de tilband voor ieder gebruik op slijtage en beschadiging.



Controleer geregeld of alle bevestigingsbouten en alle draaipunten van de MoveUp stalift nog goed vastzitten.



Controleer van de MoveUp stalift het frame geregeld op beschadigingen en roestvorming.



Controleer geregeld of de wielen nog soepel draaien en of de wielen schoon zijn.



**Waarschuwing!**  
Neemt u bij signaleren van afwijkingen bij een van de bovenstaande punten de MoveUp stalift onmiddellijk uit gebruik en neem contact op met uw technische dienst en/of uw leverancier.



**Waarschuwing!**  
Gebruik voor reiniging geen agressieve oplosmiddelen.



**Waarschuwing!**  
Pas op dat uw MoveUp stalift niet te nat wordt op plaatsen waar dit problemen kan geven met elektrische onderdelen of tot roestvorming kan leiden.



**Waarschuwing!**  
Controleer de tilband voor ieder gebruik op slijtage.

Uw MoveUp stalift dient conform NEN-EN ISO 10535 minimaal 1 maal per jaar te worden geïnspecteerd door een door de fabrikant/leverancier daartoe bevoegd persoon. Alle functionele delen moeten worden nagekeken en er dient minimaal 1 lift cyclus uitgevoerd te worden met een maximaal tilgewicht van 200 kg. De bevindingen dienen gerapporteerd te worden.

Tilbanden dienen conform NEN-EN ISO 10535 ten minste 2 keer per jaar te worden geïnspecteerd door een daartoe bevoegd persoon. Meer frequente inspectie wordt aanbevolen indien de tilband meer dan gemiddeld wordt gebruikt of gereinigd.

Deze inspecties zijn belangrijk om veilig gebruik van de MoveUp stalift te garanderen. Wanneer de MoveUp stalift goed wordt onderhouden, zult u het product jarenlang kunnen gebruiken.

Van uw MoveUp stalift dient een onderhoudslogboek te worden bijgehouden, waarin alle relevante observaties met betrekking tot defecten, schade of slijtage worden gerapporteerd. Wanneer een defect, schade of slijtage wordt geconstateerd dient dit onmiddellijk aan de leverancier gemeld te worden. De betreffende MoveUp stalift dient uit gebruik te worden genomen tot nadere inspectie en reparatie heeft plaatsgevonden.

## 9. Opslag en transport

*Dit hoofdstuk geeft informatie over het opslaan en vervoeren van de MoveUp stalift.*

### 9.1. Lange termijn opslag

- Sla de MoveUp stalift altijd op een veilige droge plek op.
- Verwijder de batterij.

### 9.2. Transport

- Vervoer de MoveUp stalift voorzichtig.

## 10. Milieutechnische aspecten

*Dit hoofdstuk bevat instructies voor het demonteren en verwijderen van de MoveUp stalift.*

De onderdelen van de MoveUp stalift moeten gerecycled worden in overeenstemming met de regels van het land waar de MoveUp stalift gebruikt wordt.

Let bij de volgende onderdelen dat een milieuvriendelijke manier van verwijderen wordt gehanteerd.

- Elektronica
- Batterij
- Plastic onderdelen

## 11. Beknopte foutopsporing

*Dit hoofdstuk bevat een beknopte foutopsporing.*

### **De MoveUp stalift werkt niet helemaal.**

1. Schakel de MoveUp stalift aan en uit. Laat de MoveUp stalift opnieuw opstarten en test of de ondersteuning nu wel werkt.
2. Controleer de stand van de noodstop. Als de noodstop is ingedrukt, kunt u hem ontgrendelen.
3. Controleer de batterijspanning. Er moet minimaal één lampje groen branden op het bedieningspaneel
4. Controleer of de MoveUp stalift van de oplader is afgekoppeld.
5. Controleer de service indicatie. Neem bij continu knipperen van de indicatie contact op met uw leverancier.

### **Het tillen met de lift en/of het tiljuk werkt niet.**

1. Schakel de MoveUp stalift aan en uit. Laat de MoveUp stalift opnieuw opstarten en test of de lift nu wel werkt.
2. Controleer de stand van de noodstop. Als de noodstop is ingedrukt, kunt u hem ontgrendelen.
3. Controleer de batterijspanning. Er moet minimaal één rood lampje branden op het bedieningspaneel.
4. Controleer of de MoveUp stalift van de oplader afgekoppeld is.
5. Gebruik de nooddaalfunctie om de lift naar beneden te laten zakken.

### **Het opladen van de MoveUp stalift werkt niet.**

1. Controleer of de laadstekker goed is aangesloten.
2. Neem contact op met uw leverancier als de laadconnector is aangesloten, maar het opladen nog steeds niet werkt.

## 12. Garantie

*Dit hoofdstuk bevat informatie over de garantie van de MoveUp stalift.*

De fabrikant geeft 1 jaar garantie op de MoveUp stalift. De fabrikant geeft geen garantie op onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage, zoals de knie/beensteunen en de lussen aan de tilbanden.

Op de accu wordt een garantie gegeven van 500 oplaadcycli of 2 jaar.

Garantie is niet van toepassing op schade of gebreken die aan de MoveUp stalift kunnen zijn ontstaan door verkeerd of onkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling hiervan ligt bij de fabrikant, of een door haar aangewezen vertegenwoordiger.

De fabrikant houdt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen, in afwijking van hetgeen in deze handleiding is beschreven. Hiervoor is geen verantwoording verschuldigd.

## 13. Contactgegevens

*Dit hoofdstuk bevat alle contactgegevens van de MoveUp stalift.*

### **Leverancier**

JOYinCARE BV  
Industrieweg 47  
8071 CS Nunspeet  
T.: 0341 768 080  
F.: 0341 768 081  
info@joyincare.com  
www.joyincare.com

### **Fabrikant**

Indes BV  
Pantheon 28  
7521 PR Enschede  
T.: 053 480 3920  
F.: 053 480 3922  
info@indes.eu  
www.indes.eu

### **Fabrikant**


Nieuwe Weme Technische Montages B.V.  
Münsterstraat 12  
7575 ED Oldenzaal  
T.: 0541 530 500  
F.: 0541 530 600  
postmaster@nieuweweme.nl  
www.nieuweweme.nl

### **Fabrikant tilbanden**

Confexion BV  
Industrieweg 14  
9403 AA Assen  
T.: 0592 268 953  
F.: 0592 268 954  
info@confexion.com

## 14. Bijlage A: Technische gegevens

MoveUp stalift			W
#	Onderdeel	Specificaties	
A	Hoogste positie	167,5	cm
B	Positie met maximaal bereik	105	cm
C	Laagste positie	105	cm
D	Hoogte van het onderstel	13	cm
E	Ruimte onder het onderstel	6,7	cm
F	Bereik op hoogste positie	-23	cm
G	Bereik op laagste	28	cm
H	Maximale bereik	28	cm
I	Volledige lengte	111,5	cm
J	Hoogte duwbeugel	121	cm
K	Maximale hoogte	167,5	cm
L	Breedte bij maximale spreiding	115	cm
M	Interne breedte bij maximaal bereik	105	cm
N	Minimale breedte	67,5	cm
O	Minimale interne breedte	52,5	cm
-	Maximaal til gewicht	200	kg
-	Tijdsduur volledige til beweging	45	sec
-	Waterdichtheid elektronica box	IPX2	
	Totaal gewicht	85	kg

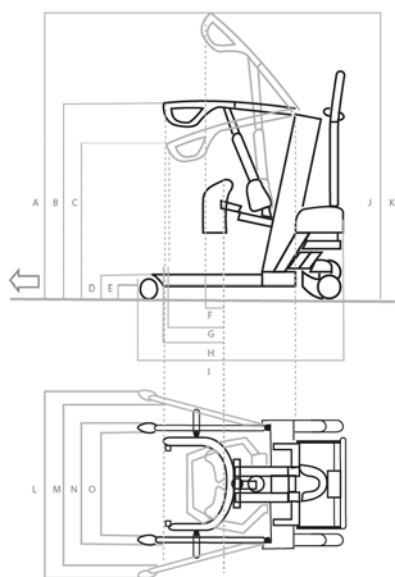

<b>Accu</b>		
<b>#</b>	<b>Onderdeel</b>	<b>Specificaties</b>
-	Soort accu	Nikkel-metaalhydride
-	Spanning	24V nominaal
-	Accucapaciteit	9 Ah
-	Aantal liftbewegingen op volle accu, bij een belasting van 100 kg	50
-	Actieradius op een volle accu, bij een belasting van 100 kg	ca. 15 km
-	Zekering accu (ontladen)	30A
-	Zekering accu (laden)	10A
-	Gegarandeerd aantal laadcycli	500
<b>Acculader type Mascot 2415</b>		
	Input	100-240 VAC
		50-60Hz max 1.3A
	Output	41V 1.8A

## 15. Bijlage B: Labels

