

PowerMove Mini *touch&move*

Gebruiksaanwijzing



1. Voorwoord

Hartelijk dank voor uw keuze voor de PowerMove Mini.

De PowerMove Mini met Touch&Move onderstel is een product van JOYinCare. JOYinCARE richt zich op alle tiltransfer vraagstukken in de gezondheidszorg en maakt deel uit van de JOYinCARE Group.

Uw PowerMove Mini maakt deel uit van een complete serie Touch&Move personenliften uitgevoerd met een unieke technologie voor moeiteloos verrijden en manoeuvreren van de PowerMove Mini. U kunt op de website www.joyincare.com meer informatie vinden over de complete serie tilliften met Touch&Move onderstel en onze overige producten.

Wij doen ons uiterste best om aan al uw wensen te voldoen en ervoor te zorgen dat wij u de beste service, training en advies bieden, zodat uw medewerkers optimaal en met veel plezier met de PowerMove Mini kunnen werken. Heeft u vragen over het gebruik van de PowerMove Mini neemt u dan a.u.b. contact met ons op. Wij vinden het belangrijk om continu in gesprek te zijn en te blijven met diegenen die onze producten gebruiken.

Deze gebruiksaanwijzing geeft de gebruiker en de onderhoudsmonteur informatie over veilig onderhouden van de PowerMove Mini Touch&Move.



- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door vóór u de PowerMove Mini in gebruik neemt. Alleen dan is een optimale veiligheid verzekerd.
- De PowerMove Mini mag enkel gebruikt worden door diegene die deze gebruiksaanwijzing hebben gelezen en begrepen, en zich aan de beschreven instructies houden.
- Jaarlijks onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd personeel.

JOYinCARE blijft voortdurend in beweging om de gebruikers van onze producten van dienst te kunnen zijn. Heeft u suggesties voor verbetering van onze producten of aanvullende ideeën voor ons productassortiment dan horen wij dit graag van u.

Met vriendelijke groet,

Pim Krijnsen

JOYinCARE B.V.

De fabrikant houdt zich het recht voor deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Wij zullen in dat geval een nieuwe versie verstrekken.

Op producten van JOYinCARE rusten octrooien. Informatie over deze octrooien is verkrijgbaar bij JOYinCARE B.V te Nunspeet.

Wij volgen een beleid van voortdurende ontwikkelingen. Technische specificaties kunnen gewijzigd worden.

Wij behouden ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging de technische specificaties van onze producten te wijzigen.

© JOYinCARE

2. Inhoud

1. Voorwoord	2
2. Inhoud	3
3. Inleiding	4
3.1. Fabrikant	4
3.2. Gerelateerde documenten	4
3.3. Product identificatie/ CE-markering	4
3.4. Copyright	4
3.5. Garantie	4
3.6. Aansprakelijkheid	4
4. Veiligheid	5
4.1. Veiligheidsymbolen in deze handleiding	5
4.2. Definities	5
4.3. Belangrijke veiligheidsinstructies	5
5. Productbeschrijving	6
6. Bediening van uw PowerMove Mini	10
6.1. Het verrijden van de PowerMove Mini	10
6.2. Het uitvoeren van een transfer met de PowerMove Mini	10
6.3. Voorbereiding	10
6.4. Het tillen met de PowerMove Mini	11
6.5. Het verplaatsen van de PowerMove Mini	11
6.6. Gaan zitten met de PowerMove Mini	11
7. Het gebruik van uw tilband	12
8. Service & onderhoud	16
9. Opslag en transport	17
9.1. Lange termijn opslag	17
9.2. Transport	17
10. Milieutechnische aspecten	17
11. Beknopte foutopsporing	18
12. Garantie	18
13. Contactgegevens	19
14. Bijlage A: Technische gegevens	20
15. Bijlage B: Labels	22

3. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt algemene informatie gegeven over de PowerMove Mini en deze gebruiksaanwijzing.

3.1. Fabrikant

De PowerMove Mini is gefabriceerd door:

Indes BV
Pantheon 28
7521 PR, Enschede
T.:053-4803920
F.:053-4803922

info@indes.eu
www.indes.eu

Mocht u vragen of problemen hebben, neem dan contact op met uw dealer.

3.2. Gerelateerde documenten

Naast deze gebruiksaanwijzing is er voor de PowerMove Mini een servicehandleiding beschikbaar. Hierin wordt beschreven hoe routine onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

3.3. Product identificatie/ CE-markering

In onderstaande afbeelding is het productidentificatieplaatje van de PowerMove Mini te zien.



Het product heeft een CE-markering, wat inhoudt dat het product voldoet aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Europese Unie.

3.4. Copyright

Copyright © JOYinCARE

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

3.5. Garantie

De fabrikant geeft één jaar garantie op de PowerMove Mini. De fabrikant geeft geen garantie op onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage. Garantie is niet van toepassing op schade of gebreken die aan de PowerMove Mini kunnen zijn ontstaan door verkeerd gebruik of onkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling hiervan ligt bij de fabrikant, of een door haar aangewezen vertegenwoordiger. De fabrikant houdt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen, in afwijking van hetgeen in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Hiervoor is geen verantwoording verschuldigd.

3.6. Aansprakelijkheid

De fabrikant van de PowerMove Mini is niet aansprakelijk voor onveilige situaties, ongevallen en schade die gevolgd zijn van:

- Het negeren van waarschuwingen of voorschriften zoals weergegeven op de PowerMove Mini of in deze gebruiksaanwijzing.
- Het gebruik van de PowerMove Mini voor andere toepassingen of onder andere omstandigheden dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Het aanbrengen van wijzigingen van de PowerMove Mini van enigerlei aard. Hieronder valt ook het toepassen van andere dan de voorgeschreven vervangingsonderdelen.
- Onvoldoende onderhoud.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade bij storingen aan het apparaat zoals schade aan producten, bedrijfsonderbreking, productieverlies, enzovoorts.

4. Veiligheid

In dit hoofdstuk worden veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de PowerMove Mini beschreven. Lees dit hoofdstuk aandachtig door voor u de PowerMove Mini in gebruik neemt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

4.1. Veiligheidsymbolen in deze handleiding

In deze gebruiksaanwijzing wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen:



Een tip of aandachtspunt.



Maakt attent op mogelijke problemen.



Gevaar voor schade aan de PowerMove Mini bij het niet zorgvuldig uitvoeren van de instructies.



Gevaar voor ernstige verwondingen van de gebruiker bij het niet zorgvuldig uitvoeren van de instructies.

4.2. Definities

In deze gebruiksaanwijzing worden enkele definities gebruikt. Een toelichting van de definities is onderstaand te vinden.

Cliënt

De persoon die met de PowerMove Mini verplaatst wordt.

Zorgverlener

De persoon die de PowerMove Mini bedient.

Transfer

De handeling van tillen, verplaatsen en het weer laten zakken van de cliënt.

Tilband

Een niet vormvaste (textiel) lichaamsondersteuning voor gebruik in combinatie met de PowerMove Mini. De tilband ondersteunt de cliënt tijdens het uitvoeren van een transfer in de PowerMove Mini.

4.3. Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor gebruik. Dit is belangrijk voor de veiligheid van uw cliënt en uzelf.



Waarschuwing!

Til nooit een cliënt die meer weegt dan 150 kg.



Waarschuwing!

Til nooit meer dan één cliënt tegelijk.



Waarschuwing!

Laat een cliënt nooit zonder begeleiding achter in een PowerMove Mini tillift.



Waarschuwing!

De PowerMove Mini is niet ontworpen voor blootstelling aan grote hoeveelheden water (stralen). De PowerMove Mini is niet geschikt voor gebruik onder de douche.



Waarschuwing!

De PowerMove Mini is niet geschikt voor gebruik op hellingen. Verrijd de PowerMove Mini nooit mét een cliënt in de lift over een helling.



Waarschuwing!

Stel de PowerMove Mini niet bloot aan temperaturen boven 50 graden Celcius.



Waarschuwing!

De elektrische aandrijving van de PowerMove Mini wordt bestuurd met sensoren in de duwbeugel. Zorg er te allen tijde voor dat de duwbeugel vrij kan bewegen en er geen krachten op de duwbeugel worden uitgeoefend, anders dan de krachten benodigd voor het voortduwen van de PowerMove Mini.

Hang geen kleding, tassen, tilbanden ect, aan de duwbeugel. Draag er zorg voor dat nooit objecten tussen de duwbeugel en de tilmast worden geplaatst of geklemd.



Waarschuwing!

Gebruik de PowerMove Mini in combinatie met tilbanden die door JOYinCARE zijn meegeleverd. U kunt deze tilbanden herkennen aan het etiket dat aan de binnenzijde van de tilband is bevestigd.



Controleer de PowerMove Mini regelmatig op loszittende delen en slijtage van bijvoorbeeld rubbers, banden of kunststof kappen. Stop in het geval u dit constateert onmiddellijk met gebruik van de PowerMove Mini en neem contact op met uw serviceafdeling of leverancier.




Om ongelukken zoals beknelling tijdens het onderhoud aan de PowerMove Mini te voorkomen is het alleen toegestaan onderhoud uit te voeren als de accu van de te onderhouden tillift verwijderd is.

De fabrikant/leverancier is niet verantwoordelijk voor schade en eventueel hieruit voortvloeiende gevolgschade in geval van molest, achterstallig onderhoud, onjuist gebruik en het afwijken van aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

5. Productbeschrijving

Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over de PowerMove Mini componenten en de werking hiervan.

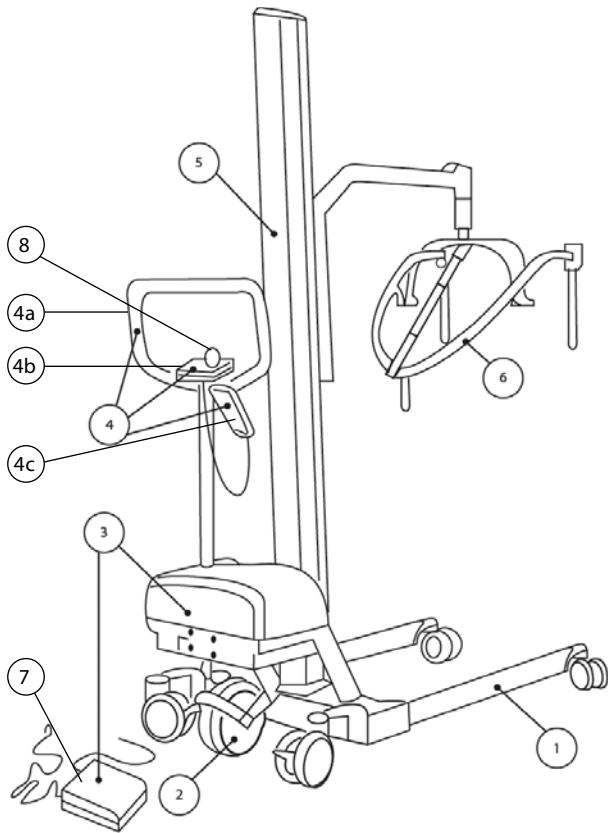

Legenda

1. PowerMove Mini onderstel (Touch&Move)
2. Elektrische ondersteuning, Touch&Move wiel
3. Elektronica-box
- 4a. Duwbeugel
- 4b. Bedieningspaneel
- 4c. Handbediening
5. Mast
6. Tiljuk
7. Acculader
8. Noodstop

PowerMove Mini onderstel (Touch&Move)

De PowerMove Mini is uitgevoerd met een onderstel met elektrisch spreidpoot mechanisme. Bediening van dit mechanisme vindt plaats op het bedieningspaneel of via de handbediening. De motor voor het spreiden van de poten bevindt zich in de middenbrug.

Het onderstel is voorzien van vier zwenkwielen. De twee achterste zwenkwielen zijn geremd. De remmen van deze wielen zijn met de voet te bedienen, door de voetbeugel naar beneden (remmen) of boven (ontgrendelen) te duwen.

Elektrische ondersteuning Touch&Move wiel

Uniek aan de PowerMove Mini is het elektrische Touch&Move wiel dat zorg draagt voor moeiteloos verrijden en manoeuvreren van de PowerMove Mini. Het wiel bevindt zich onder de elektronica-box en kan elektrisch gedraaid en

gestuurd worden. Het wiel kan draaien tot een hoek van 90 graden zijdelings in beide richtingen. Besturing van het wiel is mogelijk via de duwbeugel (4a). Bij voorwaarts en achterwaarts verrijden van de PowerMove Mini biedt het elektrische wiel een 100% elektrische ondersteuning van ca. 5 km per uur. Bij zijwaarts verrijden biedt dit wiel elektrische ondersteuning van 50% snelheid van ca. 2,5 km per uur.

Het wiel is voorzien van een polyurethaan loopvlak. Het wiel wordt met behulp van een veer tegen de vloer gedruwd. Voor het nemen van drempels en obstakels kan het wiel enkele centimeters omhoog en omlaag bewegen.



Waarschuwing!

Het Touch&Move wiel mag alleen verwisseld worden door gekwalificeerd service personeel.

Elektronica-box en acculader

Op de middenbrug van het onderstel bevindt zich een opbouw met omkapping waarin een elektronica-box geplaatst is. Deze elektronica-box bevat alle elektronica die nodig is voor het verrijden en tillen met de PowerMove Mini.



Waarschuwing!

De omkapping van de elektronica-box mag alleen verwijderd worden door servicepersoneel gekwalificeerd door de fabrikant/leverancier.

Onder de omkapping bevindt zich naast elektronica ook de accu. Deze accu hoeft tijdens normaal gebruik niet gewisseld te worden. De accu kan opgeladen worden met de bijgeleverde PowerMove Mini acculader.



Waarschuwing!

Laad Touch&Move producten (PowerMove Mini) alleen op met de bijgeleverde PowerMove Mini acculader. Gebruik van andere acculaders kan de PowerMove Mini beschadigen.




Waarschuwing!

De acculader is ontworpen voor gebruik in een droge omgeving. De acculader is niet geschikt voor gebruik in badkamers en andere natte ruimtes.

Acculader

Voor het opladen van de PowerMove Mini dient het klepje aan de achterzijde van het onderstel geopend te worden. Het opladen begint zodra de oplaadconnector is aangebracht en de acculader op het lichtnet is aangesloten.

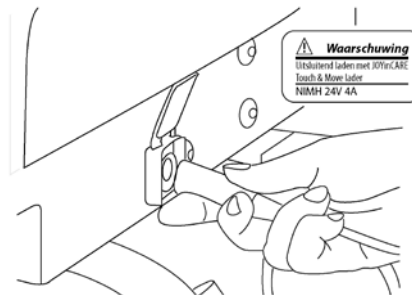

Op de acculader bevindt zich 1 indicatielampje. Zodra de acculader is aangesloten gaat het lampje rood branden en wordt de accu opgeladen. Als het lampje groen gaat branden is de accu vol en kan de stekker uit het stopcontact.

Indien een PowerMove Mini aan staat, of aangezet wordt tijdens het opladen van de batterij, zal de batterijindicatie korte tijd een animatie laten zien van oplopende groene lampjes. Daarna schakelt de PowerMove Mini uit. Tijdens het opladen kan de PowerMove Mini niet gebruikt worden. Alle tilliftfuncties worden uitgeschakeld.



Waarschuwing!

De accu van de PowerMove Mini ontladde zichzelf langzaam. De accu dient derhalve minimaal eens in de drie maanden volledig te worden opgeladen. Indien dit niet gebeurt kan de accu onherstelbaar beschadigd worden.


Op de accu wordt een garantie gegeven van minimaal 500 oplaadcycli of 2 jaar. Een teller in de electronicabox houdt dit aantal oplaadcycli bij en kan door servicepersoneel uitgelezen worden.

Duwbeugel, bedieningspaneel en handbediening

Zowel het bedieningspaneel, gemonteerd in het midden van de duwbeugel en de duwbeugel zelf spelen een rol in de bediening van de PowerMove Mini.


De duwbeugel is voorzien van een sensor die meet hoeveel kracht, en in welke richting die kracht op de duwbeugel wordt uitgeoefend. Hierdoor is het mogelijk om, door alleen de duwbeugel vast te houden en in een bepaalde richting te duwen, de mate van elektrische ondersteuning en de richting van de elektrische ondersteuning te bepalen. Op het bedieningspaneel is een aantal bedieningsknoppen en indicatielampjes te vinden.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. GO bedieningsknop | 9. Service indicatielampje |
| 2. GO indicatielampje | 10. Batterij indicatielampjes |
| 3. Bedieningsknoppen spreidpoten | |
| 4. Bedieningsknoppen liftbeweging | |
| 5. Bedieningsknoppen kantelen juk | |
| 6. Noodstop | |
| 7. Noodstop indicatielampje | |
| 8. Wielrichting indicatielampje | |

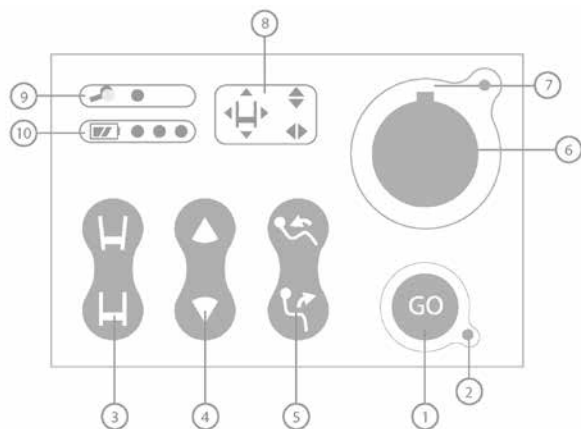

Aan de onderzijde van het bedieningspaneel bevindt zich een connector voor een handbediening. Op deze handbediening zijn enkele bedieningsknoppen die ook op het bedieningspaneel te vinden zijn geplaatst.

1. Bedieningsknoppen liftbeweging
2. Bedieningsknoppen kantelen juk
3. Bedieningsknoppen spreidpoten

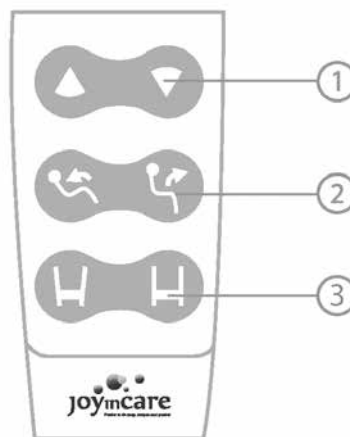

Duwbeugel

De duwbeugel van de PowerMove Mini is voorzien van een sensor, die de kracht die op de duwbeugel wordt aangebracht, kan meten. Deze sensor meet de grootte van die kracht, maar ook de hoek waaronder tegen de duwbeugel wordt geduwd; bijvoorbeeld, recht naar voren, opzij, of schuin naar achteren. Mocht de PowerMove Mini in standby staan dan is de sensor gedeactiveerd. De sensor kan geactiveerd worden door kort op de GO bedieningsknop op het bedieningspaneel te drukken.

Met het signaal van de sensor wordt het Touch&Move wiel aangedreven en gestuurd. Wordt tegen de duwbeugel geduwd, dan reageert het Touch&Move wiel door krachtondersteuning te geven.

Wordt schuin naar voren tegen de duwbeugel geduwd, dan gaat ook het Touch&Move wiel in een schuine stand naar voren staan. Wordt alleen tegen de zijkant van de duwbeugel geduwd, dan gaat het Touch&Move wiel volledig zijwaarts draaien en krachtondersteuning in zijwaartse richting geven.

Wanneer de PowerMove Mini stil staat en tegen de zijkant van de duwbeugel wordt geduwd, gaat het wiel volledig zijwaarts draaien. Met de PowerMove Mini kan nu een zijwaartse manoeuvre worden uitgevoerd. Wanneer de PowerMove Mini zijwaarts is verreden, en de duwbeugel losgelaten wordt gaat het Touch&Move wiel automatisch terugkeren naar de voorwaartse stand.

Het besturen van de PowerMove Mini gaat het best wanneer rustig tegen de duwbeugel geduwd wordt. De elektrische ondersteuning krijgt dan voldoende tijd om de PowerMove Mini in beweging te brengen, zodat geen eigen kracht gebruikt hoeft te worden bij het bewegen.

Wanneer een te grote kracht op de duwbeugel wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld wanneer de PowerMove Mini vanuit stilstand met grote kracht wordt aangeduwd kan het voorkomen dat de sensoren zich opnieuw in moeten stellen. Het

Touch&Move wiel wordt dan uitgeschakeld en de service indicatie gaat knipperen. Om de tien seconden klinkt een korte pieptoon. Wanneer de beugel losgelaten wordt, wordt de sensor na enkele seconden opnieuw ingesteld. Raak tijdens dit instellen de duwbeugel niet aan. Na correct instellen gaat het service indicatie(lampje) uit, en word het Touch&Move wiel weer ingeschakeld.



Waarschuwing!
Voorkom dat grote (piek)krachten op de duwbeugel worden uitgeoefend. De sensor kan hier in extreme gevallen onverwacht op reageren.

Activeren

Met de GO bedieningsknop (1) kan de PowerMove Mini aangezet worden. Druk hiervoor de bedieningsknop gedurende twee seconden in. Na deze twee seconden gaan alle indicatielampjes op het bedieningspaneel branden. Laat het bedieningspaneel en de duwbeugel vervolgens los. De Touch&Move technologie heeft gemiddeld zo'n 4 a 5 seconden nodig om zichzelf in te stellen. Na het doorlopen van de instelprocedure licht het GO indicatielampje (2) groen op. De PowerMove Mini is dan klaar voor gebruik. De duwbeugel mag weer vastgepakt worden.



Waarschuwing!
Laat de duwbeugel en het bedieningspaneel altijd los direct nadat de PowerMove Mini is aangezet. De sensoren in de duwbeugel waarmee de PowerMove Mini technologie bestuurd wordt hebben zo'n 4 a 5 seconden nodig om zichzelf in te stellen. Zorg ervoor dat tijdens dit instellen geen krachten op de duwbeugel worden uitgeoefend. Trek niet aan de duwbeugel, maar laat deze los. Hang geen kleding, tassen, tilbanden ect. aan de duwbeugel. Draag er zorg voor dat nooit objecten tussen de duwbeugel en de tilmast worden geplaatst of geklemd.

De PowerMove Mini kan uitgezet worden door de GO bedieningsknop, wanneer de PowerMove Mini aan staat, wederom gedurende drie seconden in te drukken. Wanneer de PowerMove Mini een uur niet gebruikt is, word deze automatisch uitgeschakeld.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de elektronische ondersteuning, na 30 minuten niet gebruikt te zijn, automatisch uitgeschakeld. Het GO indicatielampje gaat dan knipperen. Om de elektrische ondersteuning weer aan te zetten dient de GO bedieningsknop kort ingedrukt te worden.

Bediening spreidpoten

Met de bedieningsknoppen voor de spreidpoten (3) wordt het elektrisch spreidpoot mechanisme geactiveerd. Na indrukken van de bovenste knop zullen de poten zich automatisch spreiden. Na indrukken van de onderste knop zullen de poten weer sluiten. De spreidpoten bewegen zolang de bedieningsknoppen ingedrukt blijven en tot de eindstanden bereikt zijn.

Bediening lift

Met de bedieningsknoppen voor de liftbeweging (4) kan de lift hoger en lager gezet worden en kan de cliënt getild worden. Na indrukken van de bovenste knop gaat de liftarm stijgen. Na indrukken van de onderste knop gaat de liftarm dalen.

Bediening kanteljuk


Het spreiden van de poten van het onderstel en het heffen en dalen van het juk (5) van de PowerMove Mini kunnen onafhankelijk van het Touch&Move onderstel gebruikt worden, dus ook als het Touch&Move onderstel in de slaapstand staat. De knoppen voor het spreiden en heffen kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.

Bediening noodstop

Met de noodstop (6) worden alle motoren van de PowerMove Mini direct uitgeschakeld. De bedieningsknoppen en de duwbeugel werken dan niet. De noodstop kan geactiveerd worden door de rode knop recht naar beneden te drukken. Gebruik deze noodstop alleen in noodgevallen. De noodstop kan weer ontkoppeld worden door de knop in de richting van de pijlen op de knop te draaien. De knop komt dan omhoog. Indien de noodstop is ingedrukt en de PowerMove Mini aan staat gaat het noodstop indicatie(lampje) (7) oranje oplichten. Alle andere indicatie lampjes gaan uit.

Wielrichting indicatielampje

De wielrichtingindicatie (8) geeft de richting van het Touch&Move wiel weer. Indien het Touch&Move wiel in voorwaartse richting staat of wanneer een bocht gereden wordt, gaat de bovenste indicatie, met pijlen in voorwaartse richting, groen oplichten. Wanneer het Touch&Move wiel in volledig zijwaartse richting staat, gaat de onderste indicatie, met pijlen in zijwaartse richting, oranje oplichten.

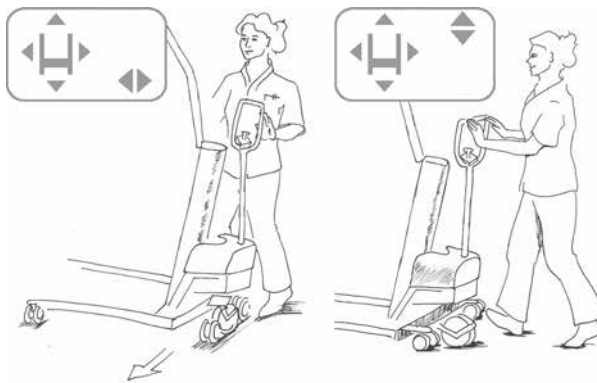

Service indicatie

De service indicatie (9) geeft aan wanneer service aan de PowerMove Mini verricht dient te worden. Na 230 uur activiteit van het Touch&Move wiel, of 160 uur activiteit van de tillift gaat de service indicatie continue oranje oplichten. U wordt geadviseerd dan contact op te nemen met uw leverancier voor het jaarlijks onderhoud van uw PowerMove Mini. Na onderhoud door gekwalificeerd servicepersoneel zal deze de indicatie weer uitzetten.

Indien het service indicatielampje blijvend oranje oplicht dan wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw leveran-

cier voor het jaarlijkse onderhoud van uw PowerMove Mini. Indien het service indicatielampje oranje knippert en na aan- en uitzetten van de PowerMove Mini blijft knipperen, vindt een storing in het elektrisch systeem plaats en is direct onderhoud vereist. Neem in dit geval contact op met uw leverancier. Afhankelijk van het type storing; in de Touch&Move aandrijving of in de liftbeweging, kunnen een of meerdere motoren niet meer werken zolang het indicatielampje knippert.



Waarschuwing!
Gebruik de PowerMove Mini niet indien het oranje service indicatielampje na uit- en inschakelen blijft branden. Rond de transfer waar u mee bezig bent spoedig af, en neem zo snel mogelijk contact op met uw leverancier.

Batterij indicatie

De batterijindicatie (10) geeft aan hoe vol de batterij nog is. Indien de batterij volledig geladen is branden drie groene lampjes. Is de batterij nog voor 45 tot 70 % vol dan branden twee groene lampjes. Is de batterij nog voor 20 tot 45 % vol dan brandt één groen lampje. Zodra de batterij voor minder dan 20 % vol is, zal één rood lampje gaan branden. U wordt geadviseerd de PowerMove Mini dan aan de oplader aan te sluiten.

Wanneer de batterij bijna leeg is gaat het rode lampje aan. Er is dan voldoende stroom over om een transfer af te maken. U kunt echter niet meer aanvangen met een nieuwe transfer. De opgaande beweging van de PowerMove Mini functioneert niet meer. Wanneer u door blijft werken met uw PowerMove Mini zal, als de batterij bijna leeg is, een piepsignaal klinken. De PowerMove Mini krachtondersteuning wordt uitgeschakeld. U kunt uw PowerMove Mini nu enkel nog laten dalen en de spreidpoten openen en sluiten

Handbediening

De handbediening bevat bedieningsknoppen voor de liftbeweging, kantelen van het juk en voor het spreiden van de poten. Bediening van deze functies kan zowel op het bedieningspaneel als op de handbediening worden uitgevoerd. De handbediening is voorzien van een flexibel spiraalsnoer. Dit maakt het mogelijk de PowerMove Mini te bedienen vanuit een positie naast de cliënt.



Waarschuwing!
De PowerMove Mini is geschikt voor het tillen van personen tot 150 kg. Til nooit personen boven dit gewicht.


Mast

De PowerMove Mini is voorzien van een mast waarmee een passieve tilbeweging gemaakt kan worden. De PowerMove Mini bestaat uit een mastgedeelte en een tilarm. Met behulp van een motor wordt de tilarm gedraaid.



Waarschuwing!
De PowerMove Mini is geschikt voor het tillen van personen tot 150 kg. Het tillen van personen zwaarder dan 150 kg kan een gevaar opleveren voor u en uw cliënt.

De PowerMove Mini is voorzien van een nooddaalfunctie. Mocht de PowerMove Mini tijdens het maken van een transfer onverhoopt uitvallen, dan kan met behulp van deze functie de cliënt gedaald worden. Aan de bovenzijde van de mast bevindt zich in het midden van de afdekplaat een bout. Met behulp van het bij de PowerMove Mini geleverde sleuteltje kan de tilarm handmatig naar boven of beneden worden gedraaid. U dient tegen de richting van de klok in te draaien om de tilarm naar beneden te bewegen.

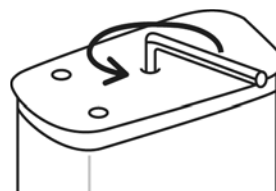

Aan het uiteinde van de tilarm bevindt zich een bevestigingsas voor een tiljuk. De PowerMove Mini wordt standaard geleverd met een elektrisch kanteljuk. Met de tillift en het kanteljuk kunnen personen tot 150 kg getild worden.

Tiljuk

De PowerMove Mini wordt standaard uitgerust met een elektrisch kanteljuk. Met behulp van dit kanteljuk kunnen cliënten tijdens de transfer van een lig- naar een zithouding worden gebracht en terug van een zit- naar een lighouding. Het kanteljuk kan bediend worden vanaf het bedieningspaneel en met de handbediening.

Het kanteljuk van de PowerMove Mini is voorzien van vier bevestigingspunten voor veiligheidsclips. Gebruik de PowerMove Mini alleen in combinatie met tilbanden van JOYinCARE, op de wijze zoals beschreven in het hoofdstuk tilbanden.

Het kanteljuk van de PowerMove Mini is niet afneembaar. Neemt u indien u het kanteljuk wenst te wisselen, contact op met uw leverancier.

6. Bediening van uw PowerMove Mini

In dit hoofdstuk wordt de juiste volgorde van gebruik omschreven van de PowerMove Mini.

De PowerMove Mini maakt deel uit van een serie elektrisch verrijdbare personenliften uitgevoerd met de unieke Touch&Move techniek voor moeiteloos verrijden.

De PowerMove Mini is een passieve, translerende verrijdbare tillift voor personen. De PowerMove Mini wordt gebruikt voor verplaatsingen tussen bed en rolstoel en naar- en van het toilet.

6.1. Het verrijden van de PowerMove Mini



Controleer of de kabel van de acculader afgekoppeld is.



Controleer het batterijniveau op het bedieningspaneel.




Er dient minimaal één groen lampje te branden.



Controleer voordat u gaat rijden of het groene indicatielampje van de GO (1) op het bedieningspaneel brandt. Indien deze groen knippert staat het Touch&Move onderstel van de PowerMove Mini in de slaapstand. U activeert het Touch&Move onderstel door kort op de GO bedieningsknop te drukken.



Controleer of de noodstop niet ingedrukt is. Het oranje indicatielampje (7) zal oplichten indien dit het geval is. Ontkoppel de noodstop door de knop rechtsom te draaien. (in de richting van de pijlen op de noodstop)
Controleer of het oranje indicatielampje (9) bij het sleuteltekentje op het display niet brandt. Knippert het indicatielampje langdurig oranje dan is er een storing van het Touch&Move onderstel en kan deze niet gebruikt worden.

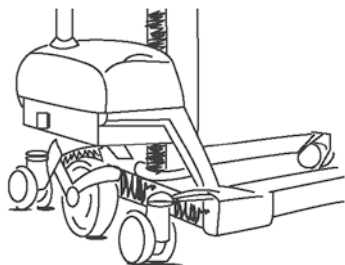

Duw voor het verrijden van de PowerMove Mini rustig met twee handen tegen de duwbeugel. Houdt u zich bij het verrijden van de PowerMove Mini aan de regels zoals deze voor het verrijden van tilliften zijn vastgelegd. De PowerMove Mini kan dan zonder krachtsinspanning verreden worden. Wanneer u een volledig zijwaartse manoeuvre wilt maken

dient u te wachten tot de PowerMove Mini volledig stilstaat. Door vervolgens tegen de zijkant van de duwbeugel te duwen zal het Touch&Move wiel volledig zijwaarts draaien en kan de manoeuvre uitgevoerd worden. Om weer in voorwaartse richting verder te rijden dient de duwbeugel kort losgelaten te worden. De richting van het Touch&Move wiel kan gecontroleerd worden met de wielrichting indicatielampjes op het bedieningspaneel.

6.2. Het uitvoeren van een transfer met de PowerMove Mini

De PowerMove Mini dient uitsluitend te worden bediend door een aantoonbaar bekwaam persoon. Deze persoon dient getraind te zijn in het gebruik van de PowerMove Mini en is bekend met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

6.3. Voorbereiding



Controleer in het zorgdossier of er lichamelijke veranderingen zijn van de cliënt. Kies voordat u gaat tillen de juiste maat en model tilband en leg deze klaar.




Controleer of de tilband geschikt is voor het gebruik met de PowerMove Mini.

Rijdt de PowerMove Mini binnen handbereik. Bepaal of de cliënt door 1 persoon met de PowerMove Mini getild kan worden, vraag indien nodig een extra persoon. Leg de cliënt uit wat u gaat doen.

Breng de tilband aan. Indien de cliënt onvoldoende rompbalans heeft, is een tweede hulpverlener noodzakelijk.

Wanneer de tilband is aangebracht, rijdt u de PowerMove Mini naar de cliënt toe. Spreid indien nodig het onderstel. Let op eventuele uitstekende obstakels zoals stoeleuning of een werkblad.

Rijdt de PowerMove Mini tot voor de cliënt. Bevestig de clips van de tilband aan de paddenstoeltjes van het juk van de PowerMove Mini. Controleer of deze goed zijn aangebracht.

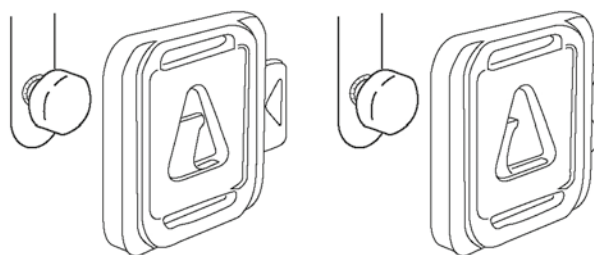

6.4. Het tillen met de PowerMove Mini

De PowerMove Mini hoeft niet op de rem gezet te worden tijdens het tillen.

Indien de cliënt onwel wordt of andere ongemakken aan-geeft dient u de tilhandeling direct te staken en de cliënt weer terug te brengen in de rolstoel of op de rand van het bed. Zodra u de knop voor het heffen op de afstandsbedie-ning los laat, stopt de handeling direct. Door het indrukken van de noodstop zullen alle functies van de PowerMove Mini stoppen.

Rijdt de PowerMove Mini naar achteren, weg van de rolstoel of het bed. Controleer de kleding van de cliënt. (Na het toiletteren de kleding weer aanbrengen) Breng de poten van de PowerMove Mini weer naar binnen, zodat u makkelijker door een deuropening kan rijden. Vrijd de PowerMove Mini naar de gewenste locatie bijvoorbeeld het toilet, een rolstoel of naar een bed. Het is door de unieke Touch&Move techniek mogelijk naast de cliënt te lopen tijdens het rijden. U heeft dan de duwbeugel vast en tegelijkertijd ook de cliënt. U kunt ook achter de PowerMove Mini lopen.

6.5. Het verplaatsen van de PowerMove Mini

Rij de PowerMove Mini naar achteren, weg van de rolstoel of het bed. Controleer de kleding van de cliënt.

Breng de poten van de PowerMove Mini weer naar binnen, zodat u makkelijker door de deuropening kan rijden. Vrijd de PowerMove Mini naar de gewenste locatie, bijvoorbeeld het toilet, de rolstoel of het bed.



Controleer tijdens het verrijden of de cliënt stabiel staat.



Controleer of de rugsteunband goed blijft zitten.

6.6. Gaan zitten met de PowerMove Mini

Rijd de PowerMove Mini tot aan de rolstoel, het bed of het toilet. Spreid indien nodig de poten van de PowerMove Mini. Zet de PowerMove Mini nooit op de rem tijdens het gaan zitten. Zo kan de PowerMove Mini meebewegen tijdens het gaan zitten, als de cliënt de zitting van het bed, de rolstoel of toilet raakt.



Verwijder indien nodig de kleding van de cliënt voor de toiletgang.

Mocht u tijdens de toiletgang van de cliënt hem/haar alleen laten, zet u de PowerMove Mini op de rem. Wacht vervolgens tot het lampje naast de GO-bedieningsknop groen knippert. Het Touch&Move onderstel staat nu in de slaapstand. Controleer altijd voordat u wegloopt of de cliënt alleen gelaten kan worden.



Controleer of de cliënt veilig zit en rijd dan de PowerMove Mini weg.

7. Het gebruik van uw tilband

Tilband omschrijving

Een tilband is een niet vormvaste lichaamsondersteuning voor het gebruik in combinatie met een personen tillift. Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, wordt gefabriceerd volgens de EN-ISO10535 norm en is gekenmerkt met het CE keurmerk.

Type personenlift

Stalift

De cliënt heeft enige stafunctie. De stalift ondersteunt de cliënt in het gaan staan/zitten.

Uitvoering: Manueel/Touch&Move vrijrijdbaar.

Passieve tillift

De cliënt wordt volledig ondersteund door de tilband.

Uitvoering: Manueel vrijrijdbaar/plafond/rail/Touch&Move vrijrijdbaar.

Maximaal draaggewicht

Tilbanden geleverd door JOYinCARE, zijn gegarandeerd tot het tillen van cliënten tot 200 kg. Op maat gemaakte banden kunnen daarop een uitzondering zijn.



Controleer vóór het gebruik van een door JOYinCARE geleverde tilband tot hoeveel kilogram tilgewicht de tillift gegarandeerd is. Indien de tillift een lager maximum tilgewicht heeft dan de tilband, dient u zich aan het tillift maximum te houden.

Baleinen


Indien de tilband geleverd is met baleinen dienen deze gebruikt te worden tijdens de transfers.

Tilband bevestiging

Een tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een tiljuk van een personen tillift door middel van clips of lussen.

A) Door middel van clips:

De clips van de tilband bevestigen aan het tiljuk van de tillift. De clip kan geplaatst worden door het schuifje aan de zijkant van de clip in te drukken. De opening die nu ontstaat, over het paddenstoeltje van het tiljuk te plaatsen en daarna het schuifje los te laten. Controleer altijd voor het tillen of de clip goed dicht zit.

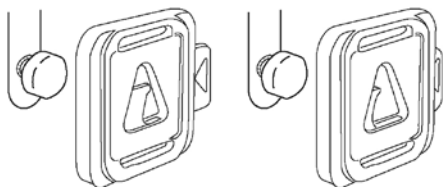

Clip open: Druk het schuifje in voor het afhalen van de clip van de paddenstoel.


Clip dicht: De clip sluit zich automatisch af na het plaatsen.

Conformiteit

De Careclip is een universele veiligheidsclips en kan veilig gebruikt worden in combinatie met elke gangbare tillift welke uitgerust is met een 4 punts tiljuk waarvan de spanbreedte tussen de schouder ophangpunten maximaal 62

cm bedraagt en is uitgevoerd met paddenstoeltjes met een diameter van 6.8 mm tot en met 8.2 mm. De Careclips aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden worden gefabriceerd volgens de EN-ISO10535 norm en zijn gekenmerkt met het CE keurmerk. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens de EN-ISO 10535 norm.

B) Door middel van lussen:

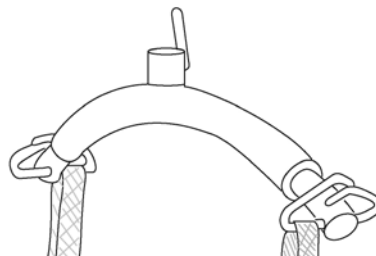

De lussen van de tilband bevestigen aan het tiljuk van de tillift. Controleer altijd manueel en visueel of alle clips of lussen goed zijn aangebracht alvorens te gaan tillen. Ook tijdens de tilhandeling nogmaals controleren.

Conformiteit:

De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met elke gangbare tillift welke uitgerust is met een tiljuk met haken.

Type tilbanden

Bij onduidelijkheid, ofwel bij de toepassing van, of de keuze voor een type tilband, altijd advies vragen aan de leverancier.

A) Rugsteunband/corsetband

Gebruik in combinatie met een stalift ter ondersteuning van het gaan staan of zitten. Controleer de stafunctie en schouderfunctie van de cliënt voor elke tilhandeling.

B) Toiletband

Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Laat het zitgedeelte vrij. Controleer de schouderfunctie van de cliënt voor elke tilhandeling. Evalueer de toepassing van een toiletband regelmatig, in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt, bijvoorbeeld afname van het lichaamsgewicht, na beenamputatie, etc.

C) Standaard tilband

Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Voor bad, douche- en algemeen gebruik. Controleer de juiste maat bij gebruik zonder kleding.

D) VIP tilband

Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Een verblijfs-tilband voor zit- of ligorthese. Loopt onder het zitvlak door. Kan niet in zitpositie aangebracht of weggehaald worden.


E) Longseat

Gebruik in combinatie met een passieve tillift. Een verblijfs-tilband voor zit- of ligorthese. Loopt onder het zitvlak door. Kan niet in zitpositie aangebracht of weggehaald worden. In combinatie met een 4 punts tiljuk alleen gebruiken in combinatie met een verbredingsstang.

Tilband aanbrenge in zitpositie

Bedoeld voor het tillen met een standaard tilband, rugsteunband en een toiletband.

1. Breng de standaard tilband aan tot op de (rol)stoel zitting. De toiletband tot aan de broekriem, de staliftband onder de schouderbladen / onderrug.
2. Sluit de okselsluiting van de toiletband. Sluit de buikfixatie van de staliftband. Plaats de armen van de cliënt over de staliftband / toiletband.
3. Haal de beenslips langs de benen naar voren van de standaard tilband en toiletband.
4. Trek de standaard tilband onder de stuit van de cliënt door met één hand aan de beenslip te trekken en met de andere hand tegen de knie duwen.
5. Haal de beenslips van de standaard tilband en toiletband één voor één onder de bovenbenen door. Plaats de baleinen in de hoofdsteun.
6. Bevestig nu de tilband aan het tiljuk.

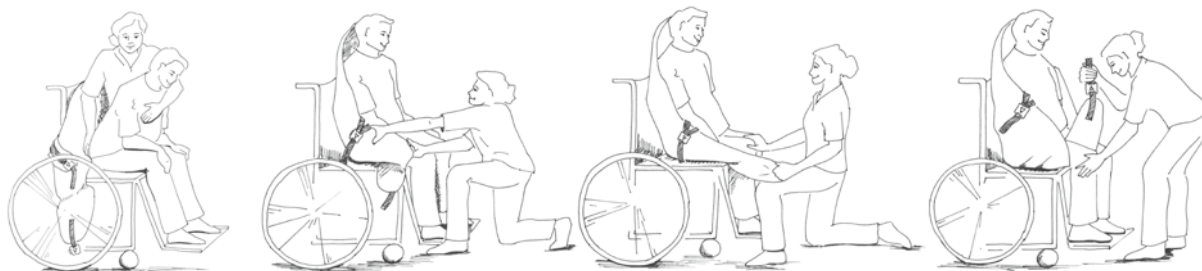

Tilband aanbrenge in ligpositie


Bedoeld voor het tillen met een standaard tilband, toiletband, VIP tilband, longseat.

1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Bij de Standaard tilband, breng aan van kruin tot stuit. Bij een VIP tilband of longseat, breng aan tot over de stuit. Bij een toiletband, breng aan tot aan de broekriem
3. Breng daarna de beenslip en de schouderclip onder de cliënt door.



**Toiletband
Standaard tilband
VIP tilband, (longseat tot
knieholte).**

4. Draai de cliënt terug op de rug. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door.
5. Plaats de baleinen in de hoofdsteun. Sluit de okselsluiting van de toiletband. Bevestig de tilband aan het tiljuk.

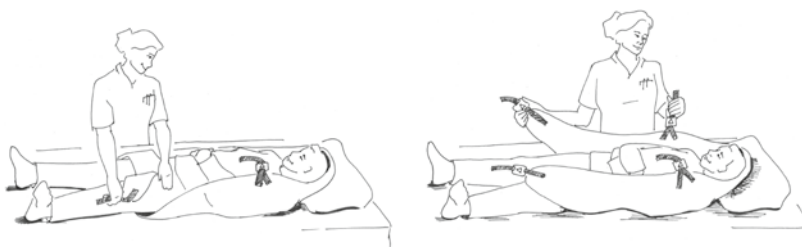

Controleer altijd of de clips of lussen goed zijn aangebracht alvorens te gaan tillen. Zorg ervoor dat de handen, armen, hoofd van de cliënt steeds binnen de tilband bevinden (met uitzondering van de toiletband).

Maten

Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt. In ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt.

kleur	maat	Lichaamslengte	borstomvang	Bij fors postuur	lichaamsgewicht
Wit	XXS	<100 cm	53-67 cm	gebruik XS	tot 200 kg
Bruin/zwart	XS	100-125 cm	67-76 cm	gebruik S	tot 200 kg
Rood	S	125-145 cm	76-87 cm	gebruik M	tot 200 kg
Geel	M	145-165 cm	87-97 cm	gebruik L	tot 200 kg
Groen	L	165-185 cm	97-112 cm	gebruik LL	tot 200 kg
Paars	LL	165-185 cm	112-127 cm	gebruik XL	tot 200 kg
Blauw	XL	>185 cm	112-127 cm	gebruik XXL	tot 200 kg
Oranje	XXL	>185 cm	>127 cm	gebruik XXXL	op aanvraag

Materialen

Polyester, katoen, bamboe, polipropyleen, nylon.

Onderhoudsvoorschriften




Controleer vòòr het in gebruik nemen van elke tilband de wasvoorschriften vermeld op het label van de tilband. Voor behoud van de tilband is het beter om de tilband in een waszak te wassen.

Verwijder de baleinen voor het wassen uit de tilband. Plaats de baleinen weer terug in de tilband voordat u weer gaat tillen.




Tilbanden niet in de droger. Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen tijdens de was-, en droogprocedure. Hierdoor kunnen onderdelen van de tilband beschadigen.

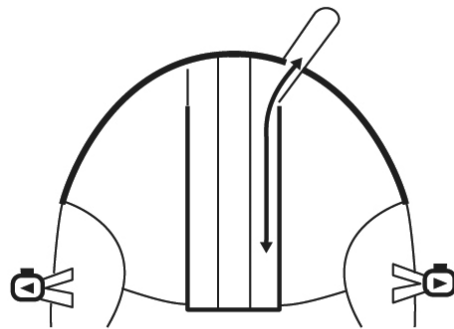

Tilbanden niet heter wassen dan 60° C. Gebruik geen wasmiddel of schoonmaakmiddel met oplosmiddel of bleekmiddel. Tilbanden niet strijken. Was de tilband bij voorkeur in een wasnet.

U krijgt een garantie voor elke geleverde tilband van 2 jaar en/of 200 wasbeurten op basis van de garantiebepalingen.

Controleer elke tilband en clips of lussen vóór elk gebruik op scheuren en wijkende delen, naden, stiksels. Vul het tilband logboek na elke wasbeurt in, maar minimaal 1 keer per maand. Bij gebleken gebreken of enige twijfel de tilband direct vervangen.




Leverancier: JOYinCARE Tel.0341-768080
 Industrieweg 47 8071 CS Nunspeet


⚠ Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing.
 Gebruik de tilband alleen met een passend tiljuk. Kies de juiste maat en model voor iedere cliënt. Voor gebruik de tilband, clips en lussen controleren op gebreken.
 Bij gebreken de tilband niet gebruiken.

⚠ Max gewicht 200Kg

<p>Model</p> <p>VIP verblijfsband ZCP</p> <p>Standaard zonder balijnen</p> <p>Longseat met beenslips</p> <p>Toiletband met hoofdsteen met buikfixatie</p> <p>Staliftband corset schuim</p> <p>Loopvest Special</p>	<p>Maat</p> <p>XXS XS S M L LL XL XXL</p> <p>Materiaal</p> <p>Polyester net Bamboestretch Katoenstretch Katoen Polyester Special</p> <p>Ophanging</p> <p>Lussen Clips Special Obesitas 300 KG</p>
---	--



Fabrikant: Confexion bv Tel.0592-268953
 Industrieweg 14 9403 AA Assen

B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	 NEN 10535
A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	

Model ←

Naam cliënt ←

Max tilgewicht →

Maat →

Materiaal →

Ophanging →

Wasvoorschrift →

CE →

8. Service & onderhoud

Dit hoofdstuk bevat informatie over de service en het onderhoud van de PowerMove Mini.

De PowerMove Mini kan het best worden schoongemaakt met een goed uitgeknepen vochtige doek. Gebruik voor het schoonmaken een gewoon, niet agressief, schoonmaakmiddel. Het is verstandig aan de volgende punten bij dagelijks gebruik aandacht te geven.

Controleer of alle functies van de PowerMove Mini nog goed werken. Breng de tilarm volledig naar boven en beneden, controleer de kantelfunctie van het tiljuk, spreid de poten volledig, test de noodstop en test of de elektrische Touch&Move ondersteuning naar behoren functioneert. Neem bij storingen contact op met uw leverancier.



Controleer voor ieder gebruik de bevestigingsclips aan de tilbanden op slijtage.



Controleer de tilband en met name de lussen van de tilband voor ieder gebruik op slijtage en beschadiging.



Controleer geregeld of alle bevestigingsbouten en alle draaipunten van de PowerMove Mini nog goed vastzitten.



Controleer het PowerMove Mini frame geregeld op beschadigingen en roestvorming.



Controleer geregeld of de wielen nog soepel draaien en of de wielen schoon zijn.



Waarschuwing!
Neemt u bij signaleren van afwijkingen bij een van de bovenstaande punten de PowerMove Mini onmiddellijk uit gebruik en neem contact op met uw technische dienst en / of uw leverancier.



Waarschuwing!
Gebruik voor reiniging geen agressieve oplosmiddelen.



Waarschuwing!
Pas op dat uw PowerMove Mini niet te nat wordt op plaatsen waar dit problemen met elektrische onderdelen kan geven of tot roestvorming kan leiden.



Waarschuwing!
Controleer de tilband voor ieder gebruik op slijtage.

Uw PowerMove Mini dient conform NEN-EN ISO 10535 minimaal 1 maal per jaar te worden geïnspecteerd door een door de fabrikant/leverancier daartoe bevoegd persoon.

Alle functionele delen moeten worden nagekeken en er dient minimaal 1 lift cyclus uitgevoerd te worden met een maximaal tilgewicht van 150 kg. De bevindingen dienen gerapporteerd te worden.

Tilbanden dienen conform NEN-EN ISO 10535 ten minste 2 keer per jaar te worden geïnspecteerd door een daartoe bevoegd persoon. Meer frequente inspectie wordt aanbevolen indien de tilband meer dan gemiddeld wordt gebruikt of gereinigd.

Deze inspecties zijn belangrijk om veilig gebruik van de PowerMove Mini te garanderen. Wanneer de PowerMove Mini goed wordt onderhouden, zult u het product jarenlang kunnen gebruiken.

Van uw PowerMove Mini dient een onderhoudslogboek te worden bijgehouden, waarin alle relevante observaties met betrekking tot defecten, schade of slijtage worden gerapporteerd. Wanneer een defect, schade of slijtage wordt geconstateerd dient dit onmiddellijk aan de leverancier gemeld te worden. De betreffende PowerMove Mini dient uit gebruik te worden genomen tot nadere inspectie en reparatie heeft plaatsgevonden.

9. Opslag en transport

Dit hoofdstuk geeft informatie over het opslaan en vervoeren van de PowerMove Mini.

9.1. Lange termijn opslag

- Sla de PowerMove Mini altijd op een veilige droge plek op.
- Verwijder de batterij.

9.2. Transport

- Vervoer de PowerMove Mini voorzichtig.

10. Milieutechnische aspecten

Dit hoofdstuk bevat instructies voor het demonteren en verwijderen van de PowerMove Mini.

De onderdelen van de PowerMove Mini moeten gerecycled worden in overeenstemming met de regels van het land waar de PowerMove Mini gebruikt wordt. Zorg bij de volgende onderdelen dat er een milieuvriendelijke manier van verwijderen wordt gehanteerd.

- Elektronica
- Batterij
- Plastic onderdelen

11. Beknopte foutopsporing

Dit hoofdstuk bevat een beknopte foutopsporing.

De PowerMove Mini werkt niet helemaal.

1. Schakel de PowerMove Mini aan en uit. Laat de PowerMove Mini opnieuw opstarten en test of de ondersteuning nu wel werkt.
2. Controleer de stand van de noodstop. Als de noodstop is ingedrukt, kunt u hem ontgrendelen.
3. Controleer de batterijspanning. Er moet minimaal één lampje groen branden op het bedieningspaneel.
4. Controleer of de PowerMove Mini van de oplader is afgekoppeld.
5. Controleer de service indicatie. Neem bij continu knippen van het indicatielampje contact op met uw leverancier.

Het tillen met de tilarm en/of het tiljuk werkt niet.

1. Schakel de PowerMove Mini aan en uit. Laat de PowerMove Mini opnieuw opstarten en test of de lift nu wel werkt.
2. Controleer de stand van de noodstop. Als de noodstop is ingedrukt, kunt u hem ontgrendelen.
3. Controleer de batterijspanning. Er moet minimaal één groen lampje branden op het bedieningspaneel.
4. Controleer of de PowerMove Mini van de oplader afgekoppeld is.
5. Gebruik de nooddaalfunctie om de tilarm naar beneden te laten zakken.

Het opladen van de PowerMove Mini werkt niet.

1. Controleer of de laadstekker goed is aangesloten.
2. Neem contact op met uw leverancier als de laadconnector is aangesloten, maar het opladen nog steeds niet werkt.

12. Garantie

Dit hoofdstuk bevat informatie over de garantie van de PowerMove Mini.

De fabrikant geeft 1 jaar garantie op de PowerMove Mini. De fabrikant geeft geen garantie op onderdelen die gevoelig zijn voor slijtage.

Op de accu wordt een garantie gegeven van 500 oplaadcycli of 2 jaar.

Garantie is niet van toepassing op schade of gebreken die aan de PowerMove Mini kunnen zijn ontstaan door verkeerd of onkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling hiervan ligt bij de fabrikant/leverancier of een door haar aangewezen vertegenwoordiger.

De fabrikant houdt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen, in afwijking van hetgeen in deze handleiding is beschreven. Hiervoor is geen verantwoording verschuldigd.

13. Contactgegevens

Dit hoofdstuk bevat alle contactgegevens van de MoveUp stalift.

Leverancier

JOYinCARE BV
Industrieweg 47
8071 CS Nunspeet
T.: 0341 768 080
F.: 0341 768 081
info@joyincare.com
www.joyincare.com

Fabrikant

Indes BV
Pantheon 28
7521 PR Enschede
T.: 053 480 3920
F.: 053 480 3922
info@indes.eu
www.indes.eu

Fabrikant

Nieuwe Weme Technische Montages B.V.
Münsterstraat 12
7575 ED Oldenzaal
T.: 0541 530 500
F.: 0541 530 600
postmaster@nieuweweme.nl
www.nieuweweme.nl


Fabrikant tilbanden

Confexion BV
Industrieweg 14
9403 AA Assen
T.: 0592 268 953
F.: 0592 268 954
info@confexion.com

14. Bijlage A: Technische gegevens


PowerMove Mini

#	Onderdeel	Specificaties	
A	Hoogste positie	214	cm
B	Laagste positie	84	cm
C	Hoogte van het onderstel	13	cm
D	Ruimte onder het onderstel	6,7	cm
E	Bereik op laagste positie	55,3	cm
F	Volledige lengte	111,5	cm
G	Hoogte duwbeugel	121	cm
H	Hoogte op laagste positie	189	cm
I	Hoogte op hoogste positie	214	cm
J	Breedte bij maximale spreiding	115	cm
K	Interne breedte bij maximaal bereik	105	cm
L	Minimale breedte	67,5	cm
M	Minimale interne breedte	52,5	cm
-	Maximaal tilgewicht	150	kg
-	Tijdsduur volledige tilbeweging	73	sec
-	Waterdichtheid electronicabox	IPX2	
-	Totaal gewicht	96	kg

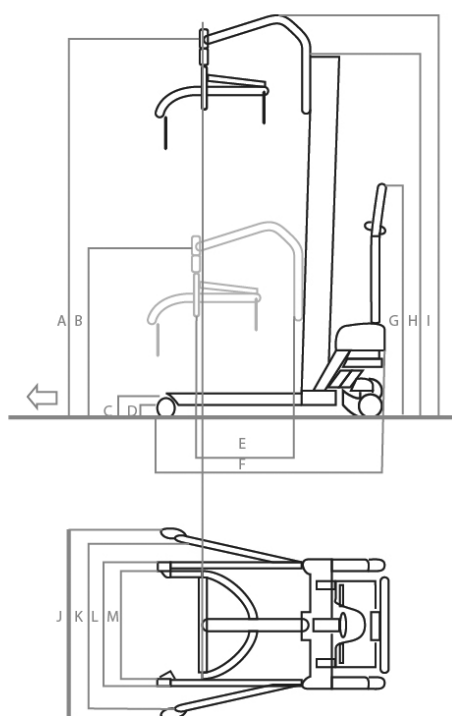

Accu		
#	Onderdeel	Specificaties
-	Soort accu	Nikkel-metaalhydride
-	Spanning	24V nominaal
-	Accucapaciteit	9 Ah
-	Aantal liftbewegingen op volle accu, bij een belasting van 100 kg	50
-	Actieradius op een volle accu, bij een belasting van 100 kg	ca. 15 km
-	Zekering accu (ontladen)	30A
-	Zekering accu (laden)	10A
-	Gegarandeerd aantal laadcycli	500
Acculader mascot 2415		
	Input	100-200 VAC
		5-60 Hz Max 1.3A
	Output	41V 1.8A

15. Bijlage B: Labels

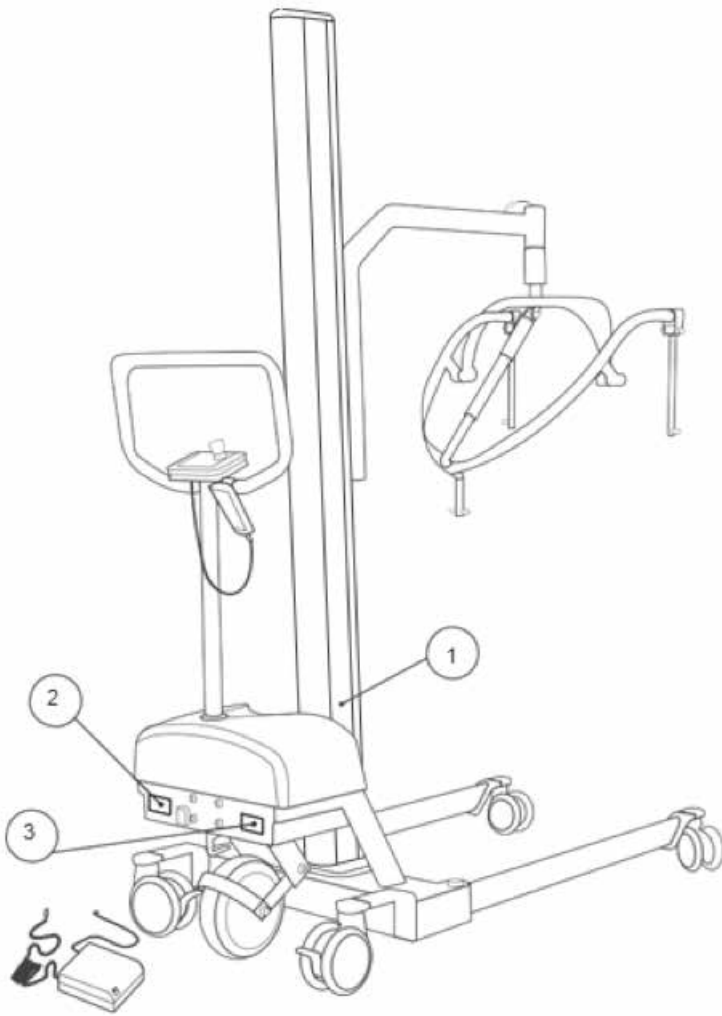

1

**Power
move mini**

MAX 150 KG

⚠ Lees voor gebruik de
gebruiksaanwijzing!

CE SN JTM 206 0001
Datum 2010-02

*Zie achterzijde platform
voor contactinformatie
leverancier en fabrikant*

2

MAX 150 KG

⚠ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing!
Alleen opladen met Touch&Move lader!

Spanning 24V DC | Verm. 480W | Cap. 9Ah
'Internally powered ME equipment'
volgens EN60601-1 | IPx2

CE SN ITM 054 0984
Datum 2009-03

3

touch&move

Leverancier
JOYINCARE B.V.
Industrieweg 47 • 8071 CS • Nunspeet • Holland
Tel+31(0)341-76 80 80 • www.joyincare.com
info@joyincare.com

Fabrikant
Indes Production Management B.V.
Pantheon 28 • 7521 PR
Enschede • The Netherlands