



De basisinstructiekaart bevat algemene instructies voor optimaal gebruik van de tillift. Dit is echter geen vervanging van de gebruikershandleiding!
Lees voor gebruik eerst de gebruikershandleiding aandachtig door!

Opladen


Door de handbediening in de wandlader te plaatsen laadt de tillift op:

1. Plaats de handbediening in de wandhouder.
2. Controleer of de laadindicatie op de handbediening **groen** brandt.
3. Als de tillift aan staat; controleer of de controleverlichting van de tillift knippert.




Controleverlichting en geluidssignaal


De controleverlichting geeft de status van de accu's weer en of deze worden opgeladen.

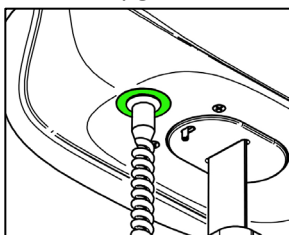

Groen: accu's zijn opgeladen.

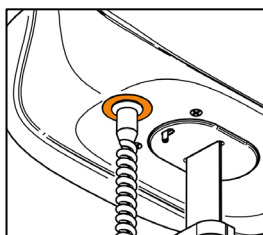


Oranje: accu's moeten opgeladen worden. Elke 10 seconden een piep.

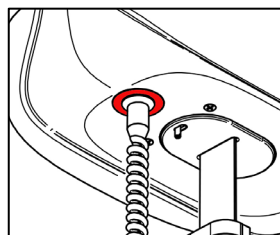

Rood: de tillift kan alleen nog maar zakken en moet direct worden opgeladen!
Elke 1 seconde een piep.
Juk kan alleen zakken.

Handbediening

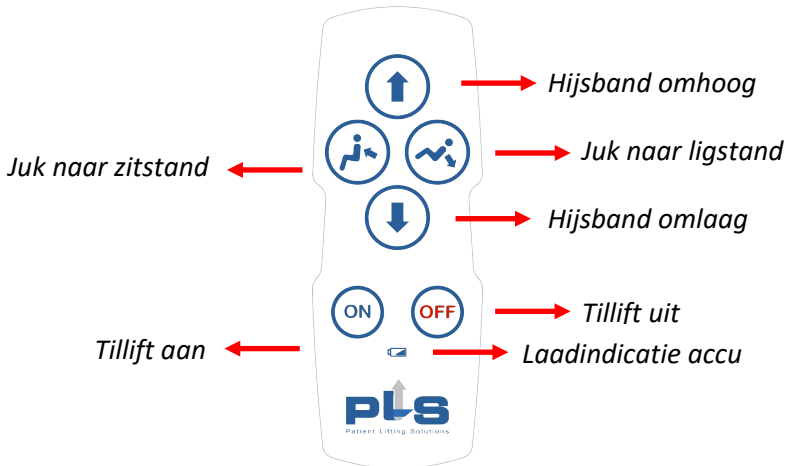


Voordat de functie voor neerlaten in werking treedt, dient er een last, zoals een juk, aan de hijsband te hangen.



Gebruik de handbediening en het juksnoer niet als sleepkoord!

Noodstop- en nooddaalfunctie

1. Trek aan het rode noodstopkoord om de lift onmiddellijk te laten stoppen.
2. Blijf aan het koord trekken om het juk langzaam te laten zakken. De neergaande beweging stop als u het koord loslaat. De tillift staat nu uit.
3. Om de tillift te activeren; druk op de **'tillift aan'** knop op de handbediening.

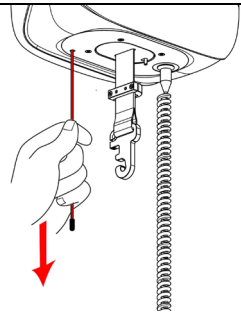

Service

Neem bij vragen, onduidelijkheden of storing(en) contact op met uw distributeur.

joyincare

TR-Care