


Verkorte gebruiksinstructie GentleMove

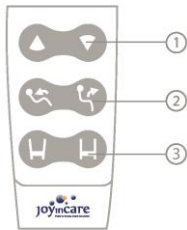


1. Bediening voor het omhoog of omlaag bewegen van de liftarm.
2. Bediening voor het positioneren van het tiljuk van zit naar lig en vice versa.
3. Bediening voor het openen en sluiten van de spreidpoten.

4. In geval van nood, druk de noodstop in om de lift uit te schakelen.



LET OP!

- Controleer altijd of de clips van de tilband goed aan de paddenstoeltjes bevestigd zijn. Zie voor een correct gebruik van de tilband de gebruiksaanwijzing van de tilband.
- De accu van de tilliften ontladend zichzelf langzaam en dient eens in de drie maanden volledig te worden opgeladen. Indien dit niet gebeurt kan de accu onherstelbaar beschadigd worden.
- Mocht de tillift tijdens gebruik onverhoopt uitvallen, kan met behulp van de nooddaalfunctie de cliënt gedaald worden.

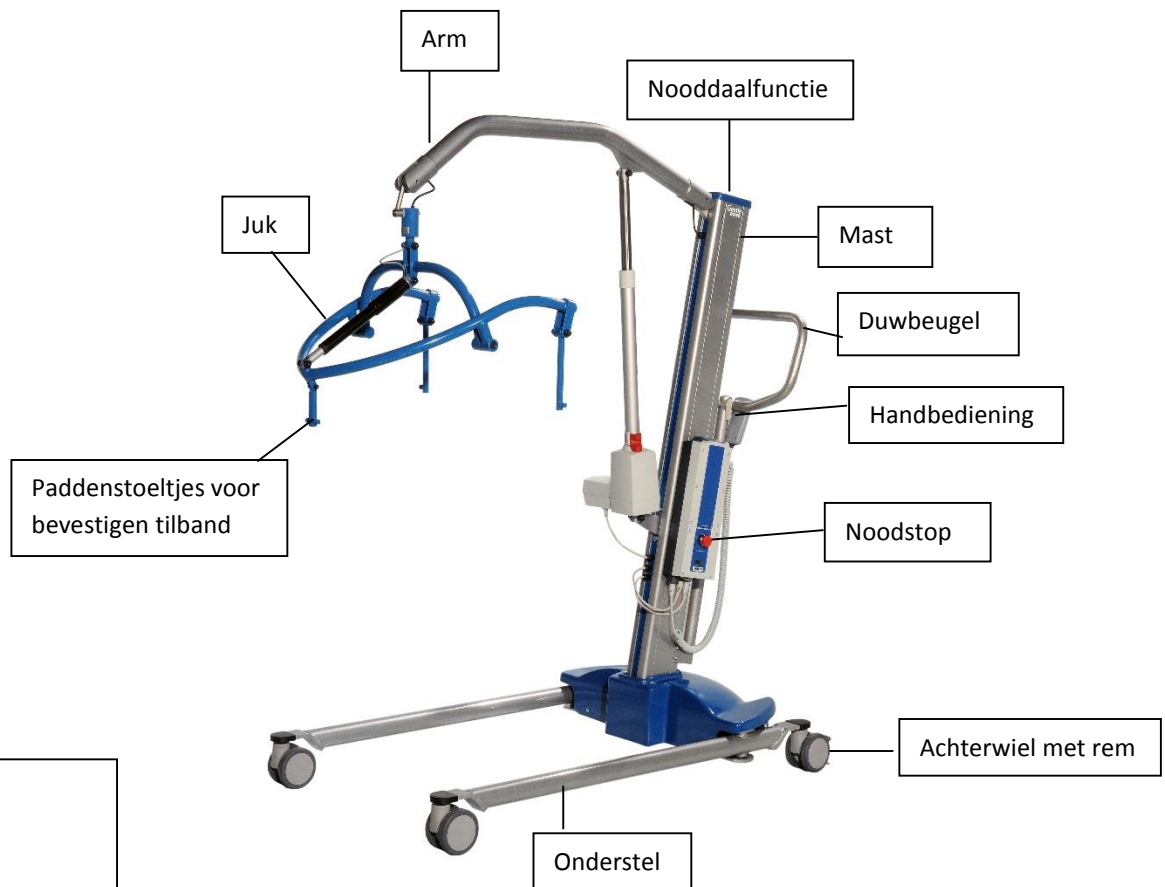

Industrieweg 47
8071 CS Nunspeet
Tel.nr. 0341-768080
Email: info@joyincare.com