


## Verkorte gebruiksinstructie PowerMove Flex / PowerMove Mini Flex

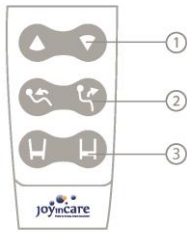


1. Bediening voor het omhoog of omlaag bewegen van de liftarm.
2. Bediening voor het positioneren van het tiljuk van zit naar lig en vice versa.
3. Bediening voor het openen en sluiten van de spreidpoten.
4. In geval van nood, druk de noodstop in om de lift uit te schakelen.



### LET OP!

- Controleer altijd of de clips van de tilband goed aan de paddenstoeltjes bevestigd zijn. Zie voor een correct gebruik van de tilband de gebruiksaanwijzing van de tilband.
- De accu van de tilliften ontladst zichzelf langzaam en dient eens in de drie maanden volledig te worden opgeladen. Indien dit niet gebeurt kan de accu onherstelbaar beschadigd worden.
- Mocht de tillift tijdens gebruik onverhoopt uitvallen, kan met behulp van de nooddaalfunctie de cliënt gedaald worden.
- Het Flexjuk heeft 8 ophangpunten. 4 oranje ophangpunten voor de bevestiging van de speciale flex toiletband met oranje veiligheidsclips en 4 grijze ophangpunten voor de bevestiging van alle andere gangbare tilbanden.

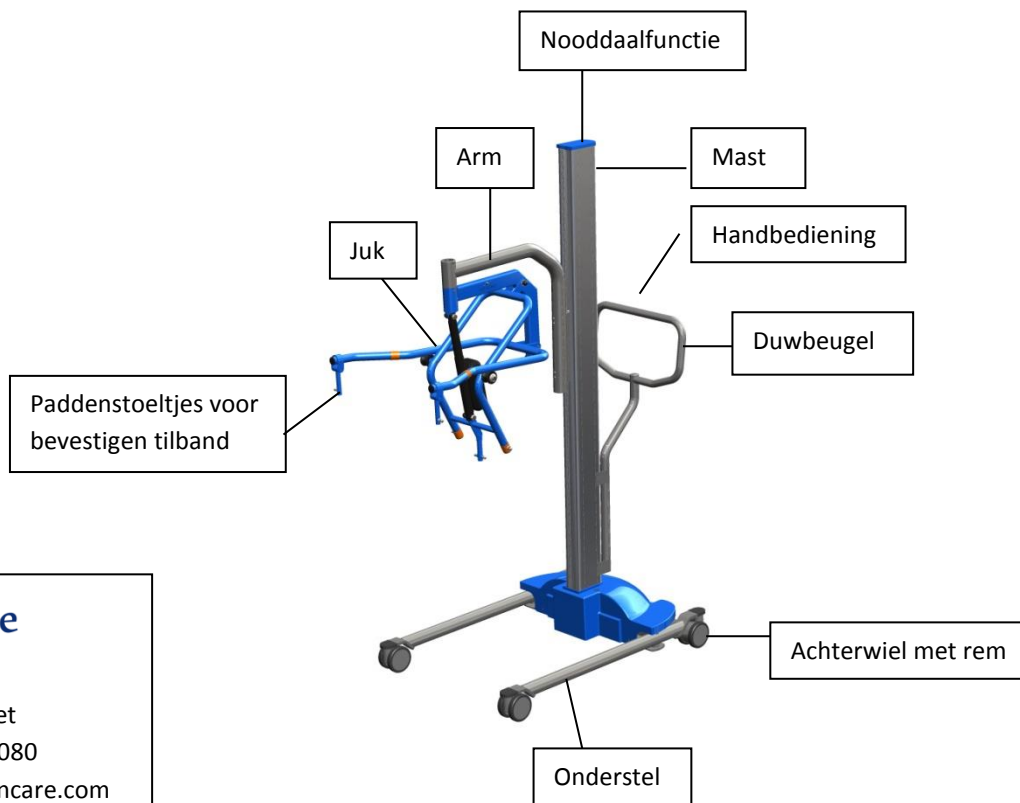

Industrieweg 47  
8071 CS Nunspeet  
Tel.nr. 0341-768080  
Email: info@joyincare.com