

Verkorte instructie HeavyMove

- Druk voor het opstarten op de "I/O" knop.
- De lampjes op het display lichten op, de lift is opgestart.
- Gebruik de rijondersteuning via de Joystick. Bij voorwaarts en achterwaarts verrijden van de HeavyMove bieden de elektrische wielen 100% ondersteuning van ca. 5km per uur.

1. Acculampjes geven aan hoe vol de accu is. Alleen rode lampjes, dan opladen.
2. I/O knop met "sleutel" Apparaat aan- of uitzetten
3. Blauwe knop: wisselen tussen de 3 snelheden. Het display geeft De actuele snelheid aan.
4. De groene knop heeft 2 functies.
 - Aandrijfwielen hoog/laag verstellen (display toont "-"). Verstelbaar met joystick.
 - Inschakelen rijondersteuning (display toont ingestelde snelheid)



5. Signaalhoorn
6. Parse knop: Inschakelen van elektrische verstelling van het onderstel. Verstelbaar met joystick L-R.
7. Joystick: Hiermee bepaald u de rijrichting.

LET OP!

- De accu van de tilliften ontladtd zichzelf langzaam en dient eens in de drie maanden volledig te worden opgeladen. Indien dit niet gebeurt kan de accu onherstelbaar beschadigd worden.
- Er zijn 2 verschillende systemen die opgeladen moeten worden. Via de handbediening wordt het systeem van de rijondersteuning opgeladen. Oplader moet aan de achterkant van de handbediening ingeplugd worden. Accu voor de tilarm motor dient uit de tillift te worden genomen en te worden opgeladen met de meegeleverde oplader.
- Mocht de tillift tijdens gebruik onverhoopt uitvallen, kan met behulp van de nooddaalfunctie de cliënt gedaald worden. Op de HeavyMove moeten beide rode schuiven op de motor omhoog bewogen worden. De nooddaalfunctie werkt alleen wanneer de tilarm belast is.
- De duwbeugel is ervoor om de HeavyMove handmatig te verplaatsen. Deze functionaliteit kan gebruikt worden als er geen cliënt vervoert wordt. Zie punt 4.



