



### Verkorte rij instructie JOYinCARE lift met Touch&Move rijondersteuning

- Druk voor het opstarten op de "Start" knop.
- De lampjes op het display lichten op, de lift is opgestart.
- Gebruik de rijondersteuning door rustig tegen de duwbeugel te duwen. Laat de lift de kracht van jou overnemen.
- Om de lift zijwaarts te verplaatsen, verplaats uw handen naar de zijkant van de duwbeugel, het aandrijf wiel zal zijwaarts draaien. De lift neemt de kracht weer over.
- Duw en draai nooit tegelijk. Alleen duwen of alleen draaien.
- De lift gaat na 15 minuten in de ruststand ("Start" lampje knippert) en start weer bij het aanraken van de duwbeugel. Na 30 minuten schakelt de lift automatisch uit.

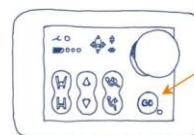

Kort indrukken

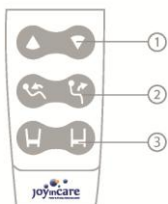

1. Bediening voor het omhoog of omlaag bewegen van de liftarm.
2. Bediening voor het positioneren van het tiljuk van zit naar lig en vice versa.
3. Bediening voor het openen en sluiten van de spreidpoten.
4. In geval van nood, druk de Noodstop in om de lift uit te schakelen.



#### LET OP!

- Controleer altijd of de clips van de tilband goed aan de paddenstoeltjes bevestigd zijn. Zie voor een correct gebruik van de tilband de gebruiksaanwijzing van de tilband.
- De accu van de Touch&Move liften ontladend zichzelf langzaam en dient eens in de drie maanden volledig te worden opgeladen. Indien dit niet gebeurt kan de accu onherstelbaar beschadigd worden.
- Mocht de tillift tijdens gebruik onverhoopt uitvallen, kan met behulp van de nooddaalfunctie de cliënt gedaald worden.

